

TRIAL LENS SERIES

検 眼 レ ン ズ シ リ ー ズ



www.inami.co.jp



Find us on Facebook!

www.facebook.com/inami.co.jp

「美」を追及した、多機能キャビネット Cura Cabinet

35対メニスカスレンズ

カラフルな35対メニスカスレンズがセットされており、試験枠にレンズを数枚装着しても負担がかからなく、最大限の軽量化を実現しております。
(レンズ径38φ)



スライドボード

スライド式のテーブルを利用することで、十分なワークスペースが確保できます。キーボードの設置やカルテ台としても利用することが可能です。また、使いやすさを追及した高さ設計も特徴です。



スッキリ収納

左右の引出しを使えば、検眼フレームなどをスッキリ収納できます。また、ラックの棚位置もお好みに応じて調節が可能です。スムーズな診察、そしていつでも美しい診療空間を創出します。



オプション引き出し

スライドボードより収納を重視する場合は、オプション引き出しを利用することで、収納力が大幅に向上します。検眼フレームなど、関連用品や消耗品の収納に最適です。



モニターアーム

ファイリングソフトを併用する場合など、専用のアームを使用し、モニターを設置することが可能です。フレキシブルなアームが、モニターをお好みの角度に調節します。



クーラベース


キャビネットタイプではなく、デスクの上に平置きしたいというニーズにお応えして、平箱タイプを単体販売しております。省スペースでの診察をサポートいたします。




価格 (税別標準小売価格)

PYS-91-35	クーラ キャビネット 35対セット	¥ 450,000
PYS-91-40	クーラ キャビネット 40対セット	¥ 498,000
PYS-91	クーラ キャビネット (レンズなし)	¥ 130,000
PYS-89-35	クーラベース 35対セット	¥ 370,000
PYS-89-40	クーラベース 40対セット	¥ 418,000
PYS-90-DR	オプション引き出し (OPTION)	¥ 20,000
PYS-90-MA	オプションモニターアーム (OPTION)	オープン価格

仕様

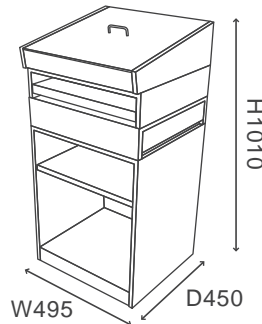

外寸法/ H1010-D450-W495mm
スライドボード/ W460-D377mm
引出し/ 2ヶ(左1・右1)
仕切り板/1枚 (MAX500W)
底面キャスター/ 4ヶ
付属レンズ/ メニスカス(35対 or 40対)

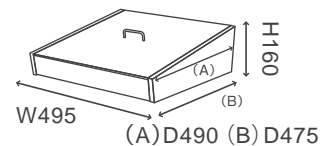

持ち運びも可能な省スペースモデル Cura Box



PYS-78A
24対セット ケース付き (メニスカスレンズ)

PYS-78B
追加セット ケース付き (メニスカスレンズ)

PYS-78S (PYS-78A + PYS-78B)
35対セット ケース付き



35対収納イメージ



24対持ち運びイメージ


価格 (税別標準小売価格)

PYS-78S	検眼レンズ クーラBOX 35対セット ケース付	¥ 395,000
PYS-78A	検眼レンズ クーラBOX 24対セット ケース付	¥ 272,000
PYS-78B	検眼レンズ クーラBOX 追加セット ケース付	¥ 152,000

35対セット(2段ケース)寸法/ H130/D281/W307mm
24対セット(1段ケース)寸法/ H78 /D281/W307mm

注目の累進対応検眼レンズ

近年の加速度的な高齢化社会に伴い、累進需要者は比例して増加しつつあります。
 眼科施設においても、累進(遠近両用)レンズを用いた検眼の需要が高まっております。
 (総務省の統計では、2025年には全人口の約48%が65歳以上となる報告が上がっております。)
 ※ 累進レンズとは、1枚のレンズの中での境界線がなく、度数が徐々に変化するレンズを指します。
 ※ 患者様の状態とレンズの組合せによって、近々、中近、遠近の処方が可能です。

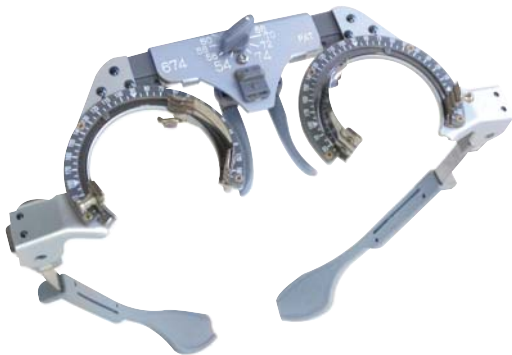

専用検眼フレーム

前面と後面に検眼レンズが装着できる仕様となっております。前面には、通常の検眼レンズ、後面には累進検眼レンズを装着します。

累進レンズセット

レンズ下部にのみ、度が入っており、上部は度なしの素通し使用となっております。
 22枚入り +1.00 ~ +3.50(11度数 /0.25 間隔)




価格 (税別標準小売価格)

MC-672-LO	累進レンズ用試験枠PD調整付	¥ 19,600
-----------	----------------	----------

価格 (税別標準小売価格)

PYS-95-11	累進レンズセット クーラ 11対	¥ 137,000
-----------	------------------	-----------

使用方法

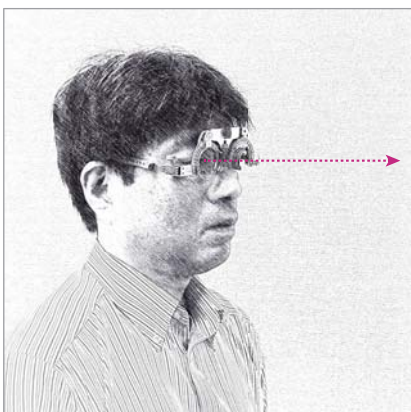

① 通常測定(例 5m)
通常検眼レンズ装着





② 近見測定(≒30cm)
通常検眼レンズ装着



③ 近見測定(≒30cm)
通常検眼レンズ+累進検眼レンズ装着

検眼フレーム前面に装着した通常検眼レンズで、度数を測定(①)した後、そのまま近見を測定(②)します。近見が見えづらい場合、後面に累進検眼レンズを重ねて装着し、近見の矯正(③)を行います。その際、前面の通常検眼レンズは外しません。

処方例

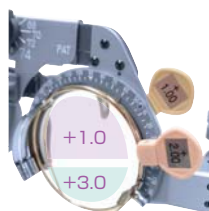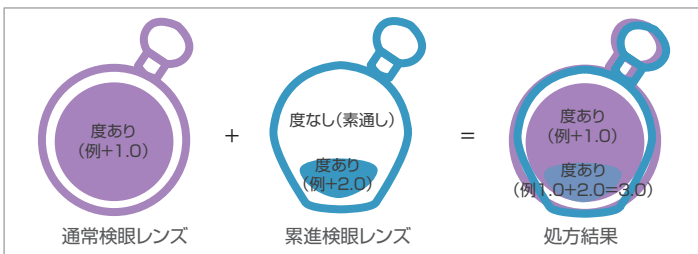

この場合の累進レンズの処方は、
 ① +1.0
 ② +3.0 (通常レンズ1.0+累進レンズ2.0)

PD調節が可能な万能試験枠。

PD調整が可能のため、あらゆる患者さまに最適な設定が可能です。
また、高い耐久性と、被験者のストレスを最大限軽減する軽量設計も特長です。

価格 (税別標準小売価格)

K-0391	万能試験枠 Black	¥ 27,600
K-0391-G	万能試験枠 White	¥ 27,600
K-0391-V	万能試験枠 Violet	¥ 27,600


瞳孔距離：48~80mm
角膜測定目盛り：2mm間隔
フレーム角度調整：35°(上方向30°±5° / 下方向5°+5°-2°)
フレーム長さ調整：35mm
最大レンズ枚数：10枚(片側5枚)
レンズ角度：0°±5° / 180°±5°



患者さまにやさしいチタンフレームを採用。



PD サイズは52~70mm(2mm 刻み)で全10タイプを用意し、PD サイズにより3タイプのカラーがあります。掛けはずしの際、肌に触れる部分にはチタンを使用していますのでアレルギーなどの心配はありません。また、乱視軸の調整は回転ツマミを回転させて簡単に行うことが可能です。

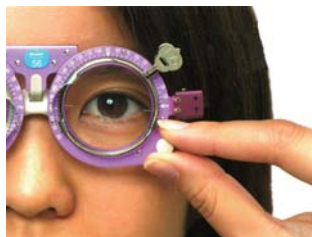

価格 (税別標準小売価格)

K-0350-52-P	軽量試験枠 くるりんこ 52mm ピンク	¥ 9,800
K-0350-52-B	軽量試験枠 くるりんこ 52mm ブルー	¥ 9,800
K-0350-54-P	軽量試験枠 くるりんこ 54mm ピンク	¥ 9,800
K-0350-54-B	軽量試験枠 くるりんこ 54mm ブルー	¥ 9,800
K-0350-56-P	軽量試験枠 くるりんこ 56mm ピンク	¥ 9,800
K-0350-56-B	軽量試験枠 くるりんこ 56mm ブルー	¥ 9,800
K-0350-58-B	軽量試験枠 くるりんこ 58mm ブルー	¥ 9,800
K-0350-60-B	軽量試験枠 くるりんこ 60mm ブルー	¥ 9,800
K-0350-62-B	軽量試験枠 くるりんこ 62mm ブルー	¥ 9,800
K-0350-64-B	軽量試験枠 くるりんこ 64mm ブルー	¥ 9,800
K-0350-66-G	軽量試験枠 くるりんこ 66mm グリーン	¥ 9,800
K-0350-68-G	軽量試験枠 くるりんこ 68mm グリーン	¥ 9,800
K-0350-70-G	軽量試験枠 くるりんこ 70mm グリーン	¥ 9,800

瞳孔距離：52~70mm ※10種類
最大レンズ枚数：6枚(片側3枚)
レンズ角度：0°±5° / 180°±5°

レンズ一覧 (クーラキャビネット・クーラボックス共通) ※Sレンズ・Cレンズは、マイナス、プラスともに左右2枚ずつセットされております。

スフィア(S) ※(-)(+)

	40対	35対	24対	追加SET		40対	35対	24対	追加SET
0.12	2	2	2		4.25	2	2		2
0.25	2	2	2		4.50	2	2	2	
0.37	2				4.75	2	2		2
0.50	2	2	2		5.00	2	2	2	
0.62	2				5.25	2	2		2
0.75	2	2	2		5.50	2	2	2	
0.87	2				5.75	2	2		2
1.00	2	2	2		6.00	2	2	2	
1.25	2	2	2		6.50	2	2		2
1.50	2	2	2		7.00	2	2	2	
1.75	2	2	2		8.00	2	2	2	
2.00	2	2	2		9.00	2	2		2
2.25	2	2	2		10.00	2	2	2	
2.50	2	2	2		11.00	2	2		2
2.75	2	2	2		12.00	2	2		2
3.00	2	2	2		13.00	2	2		2
3.25	2	2	2		14.00	2			
3.50	2	2	2		16.00	2	2		2
3.75	2	2	2		18.00	2			
4.00	2	2	2		20.00	2	2		2

シリンダー(C) ※(-)(+)

	40対	35対	24対	追加SET
0.25	2	2	2	
0.50	2	2	2	
0.75	2	2	2	
1.00	2	2	2	
1.25	2	2	2	
1.50	2	2	2	
1.75	2	2	2	
2.00	2	2	2	
2.25	2			
2.50	2	2	2	
3.00	2	2	2	
3.50	2	2	2	
4.00	2	2	2	
4.50	2			
5.00	2			

プリズム

	40対	35対	24対	追加SET
0.5	2	2		2
1	2	1		1
2	1	1		1
3	1	1		1
4	1	1		1
6	1	1		1

アクセサリ

	40対	35対	24対	追加SET
グリーンレンズ	1	1	1	
レッドレンズ	1	1	1	
ブレーション	1	1		1
マドックスレンズ	1	1		1
ピンホール (0.5)	1	1		1
ピンホール (1.0)	1	1	1	
ピンホール (1.5)	1	1		1
ピンホール (2.0)	1	1		1
遮蔽板	1	1	1	

INAMI 株式会社 **イナミ**
A Passion for a Nice View

※本カタログ記載価格は、すべて2014年1月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: http://www.inami.co.jp Email: corpinfo@inami.co.jp
名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市中東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18コミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355