

Amblyz™メガネで子供たちは**遊び感覚**で目の矯正を行うことができます。

Amblyz™メガネ（眼鏡型電子デバイス）は、スタイリッシュなデザインと、実用性を兼ね備え、全く新しいアプローチで目の矯正を実現します。

まさに、3歳から10歳までの子供に最適なトレーニングアイテムとして開発されました。



AMBLYZ ™
Glasses from **XPAND** Medical Division



www.amblyz.com

Amblyz™ メガネについて

電子メガネ Amblyz™ は片方のレンズを断続的に開閉する技術をベースにして、目の閉塞を行う医療デバイスです。Amblyz™ メガネは普通のメガネと同じ形状でその使用を容易にします。Amblyz™ メガネは通常の処方メガネも同時に着用できます。

Amblyz™ メガネは眼科医が使用を勧め、眼鏡師が子供のために処方されたAmblyz™ 設定を行います。

Amblyz™ メガネは XPAND™ と世界的に有名な眼科医や検眼医が協力して開発しました。その技術はテストされており効果や安全が実証されています。



Amblyz™ メガネ

| 商品コード | 価格 |
|--------|----------|
| AMB101 | ¥ 60,000 |

Amblyz™ メガネの操作

Amblyz™ メガネは電子シャッターを制御する様にプログラムされたマイクロチップが、ファッショナブルなメガネフレームに組み込まれています。電子シャッターレンズは液晶板で、2枚のガラスで挟まれておりプラスチック層でカバーされています。シャッターに電圧がかかると透明状態(オフ/開)から黒、そして不透明状態(オン/閉)に変わります。この様にAmblyz™ メガネは短い断続的な閉塞行為が行われます。この技術は効果的で安全・良好な耐久性が実証されています。

このデバイスは充電式の電池を採用されており、“バッテリー低下”表示が点灯したら数時間の充電が必要です(2,3日に一度は充電が必要になります)

アイパッチの問題点

現状のアイパッチ方式の不便さ、不快感そして美的面、社交上や親の問題などが低い使用定着率、子供や親の欲求不満を起こします。片目をパッチで覆う事によって子供社会ではあだ名などをつけられるかもしれず、この気まずい立場を成長期の間ずっと感じ続ける事もあるでしょう。体の一部分を攻撃対象にされ不快な思いをするといった事は珍しい話ではありません。

仕様

| | |
|--------------|-------------------------|
| 寸法 | 長さ129 x 幅129 x 高さ40 mm |
| 重量(矯正フレーム含む) | 36.4 g |
| ノーズピース重量 | 1.7 g |
| 矯正フレームの重量 | 2.2 g |
| レンズのタイプ | LCD (必要なら矯正メガネレンズも装着) |
| デバイスの最大電圧 | 10V レンズ動作 |
| バッテリータイプ | リチウムイオン ポリマー 3.7V 60mAh |
| | 充電式電池(最大電圧: 4.2V) |
| 最低連続動作時間 | 48 時間 |
| USBコネクタタイプ | USB マイクロ-B |
| 充電時間 | 3 時間以上 |

製造販売届出番号:13B1X00048002144

Amblyz™ メガネフレーム

Amblyz™ メガネは便利で実用的、美的に目の閉塞行為を提供するために開発されました。Amblyz™ メガネフレームは子供のために何が特に良いか考えられてデザインしました。



- 視覚問題を抱えた子供達には通常修正メガネが必要です。Amblyz™ メガネは度付きのメガネを合体させる事ができ、通常お使いのメガネをかけている様に、そして同時に目の矯正もできる様になっています。
- メガネは子供に優しいユニセックスなデザインが特徴です。
- 内側の裏地にはやわらかいゴムが使われており、一日中かけても最適なフィット感満足度は損なわれません。
- フレームは軽量・丈夫な上質のプラスチックでできています。

開発チーム

XPANDは臨床結果の最適化を目指し、新たな治療法を発見する研究に取り組んでいくことを約束します。ベン・エズラ博士が率いる私たちの学際的医療研究チームは医師、眼鏡師、物理学者やエンジニアと協力し皆で次世代のアクティブシャッター医療機器を出来る限り活用し、テストし、供給します。XPANDは、世界中の主要な医療センターと協力し、常に新たな研究開発と人類に貢献できる機会を追求して行きます。

AMBLYZ

Inami
SYNOPTISCOPE
L-2510B

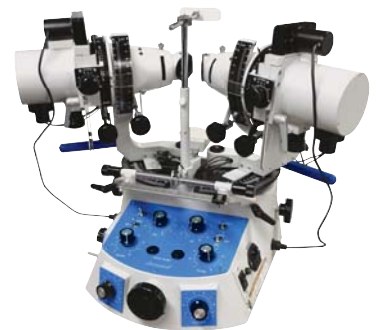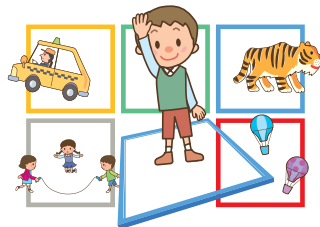

製造販売元  株式会社 **イナミ**

※本カタログ記載価格は、すべて2015年11月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。

A Passion for a Nice View

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp
名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市中区東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355