



眼科手術用排液器〈Sorifice〉

ソリフィス[®]

新しい自動排液のご提案

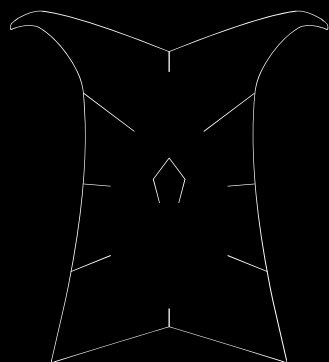

Minimum element, maximum effect.

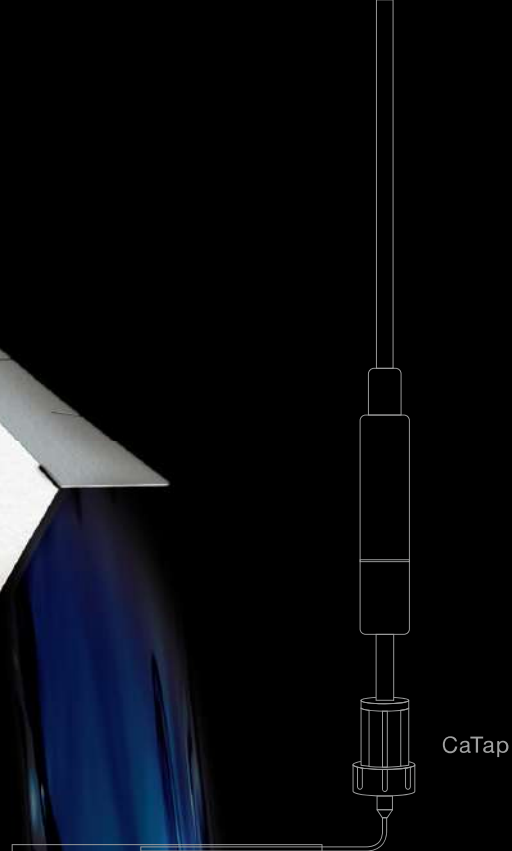

目尻に載せるだけで、 簡単に自動排液。



簡単なセッティング

ソリフィスを載せるだけで
排液が開始されます。

※煩雑な機械操作などはありません。

清明な術野の確保

U/S時など創口から眼内灌流液が
大量漏出する際の液面上昇を抑制し
術野の清明性を保ちます。

一滴の点眼でも等量分を
即座に排液して滞留を防ぎます。




創口の汚染防止

素早い排液で液体貯留を
防ぐため、創口の汚染リスクを
低減します。

角膜露出


ソリフィスは、無処置やガーゼ法と比較して、液面上昇を抑える効果があり、角膜の露出を改善します。

角膜露出ライン

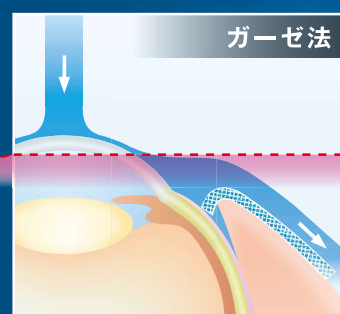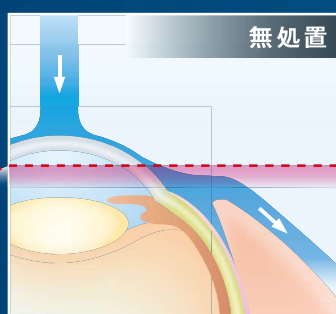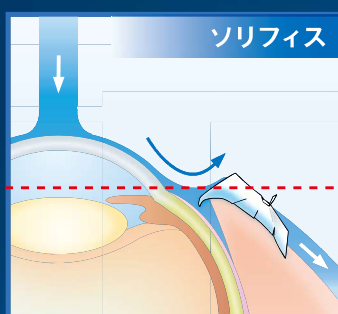

ソリフィス特性


ソリフィス本体は
親水性*のある不織布を
使用しております。
※水となじむ性質

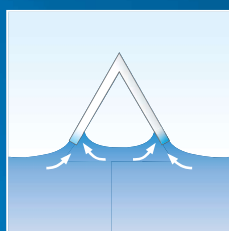

01

付着力

ソリフィス本体を
水面に近付けると
水が吸いついてくる。

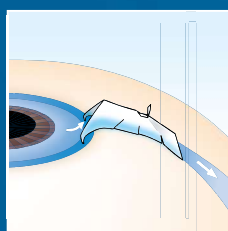

02

水路形成保持

一度出来た排水路は
一滴でも水が接触すれば
継続的に流れ続ける。

「3スリット」デザイン

3つのスリットを入れて、多様な目尻形状に対応する立体デザインを採用しました。

腕部は、目尻の皮膚が持ち上がる瞼裂の狭い目や奥目の症例でもしっかりと回り込む構造ですので、結膜底部の液体まで排液可能です。



腕部(両側)
[眼瞼縁を乗り越える]

手甲部(両側)
[結膜に接触し
眼瞼縁に引っ掛ける]

摘み部
[ピンセット等で把持する]

山折りライン

吸入口

第1スリット(両側)

第2スリット(両側)


第3スリット(両側)

側方水路保持部(両側)
[設置面(目尻)に沿って
排水路を保持する]


排液口

コンパクトボディ


ソリフィス本体は
開瞼器枠内に収まる大きさです。

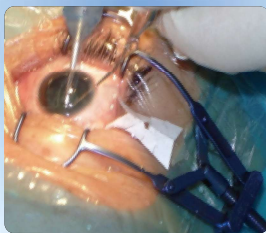


推奨形状の作り方

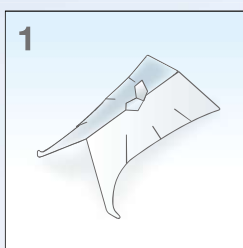


●摘み部を立てて折り曲げる。

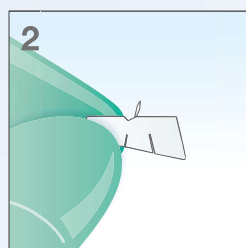


●腕部を瞼裂内に、手甲部が結膜に触れるように第1スリットを含めて前方(腕部)を摘み、山折りラインを深くする。

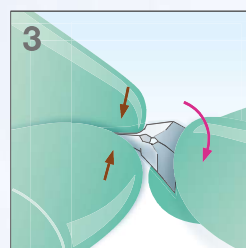

●設置面(目尻)の形状に沿いやすくするため、後方を開いて摘み、山折りラインを湾曲させる。

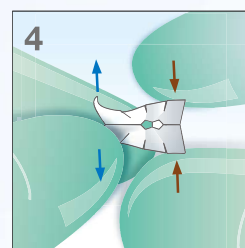

●山折りが深くなり過ぎた前方(腕部)を広げ浅くなり過ぎた後方を軽く狭める。

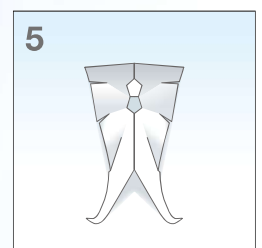

●推奨形状の完成。第1～第2スリット間の山折りが最も深くなっている。

Wet&Dry自動システム

キャタップ + ソリフィス

自動点眼装置

キャタップ



自動点眼



自動排液器

ソリフィス




自動排液


設置のコツ




● 摘み部をピンセットで把持し、本体裏面（排液面）を生理食塩水などで濡らす。

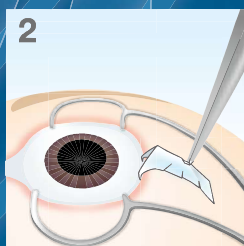


● 手甲部が結膜に触れ、眼瞼縁の引っ掛かりやすい位置に設置する。
(この際、手甲部が結膜に触れていることを確認してください)

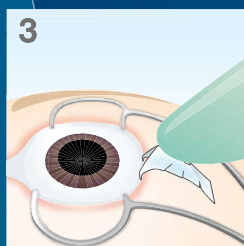


● 設置後に山折ラインを軽く押し付けて設置面の形状に合わせる。

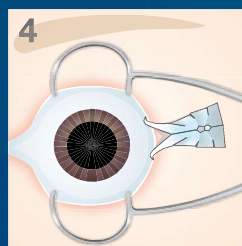

● やや上方偏移の斜め掛けが最良の設置位置となることが多い。
(手甲部—腕部—側方水路保持部が片側だけでも機能していれば排液効果は得られます)

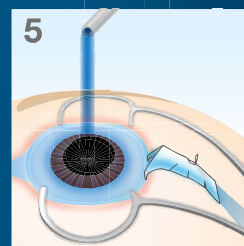

● 設置後、やや多めの生理食塩水などの水掛けを行い側方水路形成を促す。

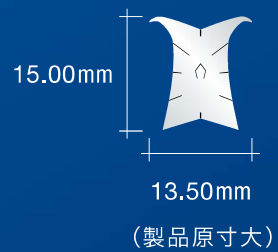

Minimum element, maximum effect.



詳細動画はこちらから

自動排液器 ソリフィス〈Sorifice〉

製品名	ソリフィス
コード	20711
包装単位	20個/箱
標準小売価格	¥ 12,030

医療機器届出番号: 13B1X00085000090



関連商品のご紹介

好評発売中

自動点眼装置 キャタップ〈CaTap〉



キャタップ取付例

- 片手操作で簡単に角膜頂点への点眼が可能
・最小限の点眼で清明な術野を確保します。・センタリングの確認が容易です。
- 安定した点眼タイミング
・術者の水掛け指示が減り、ストレスが軽減されます。
・手術助手は、水掛け以外の作業に集中できます。
- フリーサイズ
・各社顕微鏡に付属品なく装着が可能です。
- シングルユース
・常に清潔な状態で使用できます。・使用後のメンテナンスが不要です。

製品名	キャタップ	キャタップ固定用具
コード	20703	20702
包装単位	10本/箱	5個/箱
標準小売価格	¥ 49,750	¥ 8,750

医療機器認証番号: 218AABZX00058000



キャタップ



キャタップ固定用具

水かけは「キャタップ」にお任せください

●表紙のCGはイメージ図であり、製品とは異なる部分がありますので、ご了承下さい。 ●製品改良にともない予告なく仕様、外観などを変更させて頂く場合がありますので、ご了承下さい。

販売



株式会社 イナミ

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース: 〒452-0807 愛知県名古屋市西区歌里町2 アルテリーベ1号室
大阪ベース: 〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18 ユニール
九州ベース: 〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

製造販売業者

株式会社 トップ

本社: 〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号



The TOP in Quality

Since 1940