

M-01 異物除去（おたま鑷子・異物針・匙・ドリル）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品


サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



view

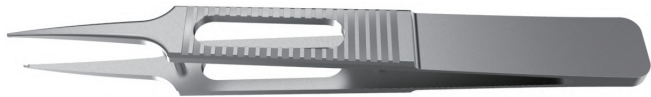

「おたま」ですくい取るような操作感でベストセラー。

角膜異物、結膜異物、結膜結石に特に有用で、鉄片異物の場合は、周囲の錆も含めて一動作で簡単にすくい取ることが可能です。異物除去の際に見失うなどのトラブルや、煩雑な錆取りの作業の必要性もなくなるため、素早い処置が可能となります。患者さまにおいても、処置時間が短縮することにより負担が一層軽減されると同時に、異物針のように鋭利な形状をしていないため、不安を軽減することが可能です。

ご考案者 高橋 大介 先生（青森県 弘前市 たかはし眼科）コメント

「開いた形は二本の異物針、閉じた形はおたま状になっていて、柔らかな組織の異物をあたかも手ですくい取るように除去できます。角膜上皮の鉄粉異物、結膜上皮の結膜結石などに有用で、周囲のさびも含めて、一動作ですくい取ることができ、翼状片の残存組織などを把持するのも容易です。異物を取るとき一度でもイライラしたことのある方には特にお勧めです。」

高橋氏おたま型小異物鑷子 “すくい取り”

M-2015 全長 86mm / 先端 0.4mm 匙φ0.7mm ￥36,000 JAN:4547451313304

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000166 入 1



鉄片異物錆取用鋭匙

S-111 全長 125mm / 先端 0.7×0.5mm ￥15,000 JAN:4547451033431

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 屈 13B1X00048001174 入 1

微細な錆取りが可能な極小鋭匙。

極小の匙が微細な周囲の錆を丁寧に除去することを可能にします。



view



Best
Seller

両頭角膜鋭匙

S-116L 大 #3 全長 124mm / 先端幅 3.5 / 3.0mm ￥26,000 JAN:4547451042983

S-116M 中 #2 全長 124mm / 先端幅 3.0 / 2.3mm ￥26,000 JAN:4547451042990


S-116S 小 #1 全長 124mm / 先端幅 2.3 / 1.5mm ￥26,000 JAN:4547451043003

S-116X 極小 #0 全長 124mm / 先端幅 1.5 / 1.3mm ￥26,000 JAN:4547451043010

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 屈 13B1X00048001177 入 1

状況に応じて使い分けることが可能な両頭鋭匙。

匙を利用して異物除去後の錆を掻き出すように除去することが可能です。掻き出しに便利のように先端部をやや曲形状にしております。また、サイズの異なる両頭となっているため、状況に応じて使い分けることが可能です。4種類のサイズよりお選びいただけます。

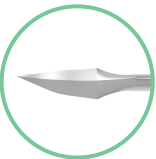

view



Quick
Service

Best
Seller

片柄異物針

S-21S 全長 125mm / 先端 1.7mm ￥9,600 JAN:4547451034377

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16025000 屈 13B1X00048001576 入 1

シンプルで使いやすいロングセラーの異物針。

表層異物をはじき出すように除去することが可能です。

Quick
Service

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

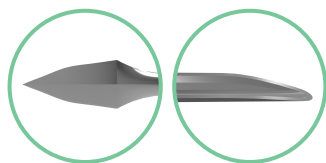

両頭異物針


S-21D 全長 120mm / 針幅 1.7mm / のみ幅 1.3mm ￥13,000 JAN:4547451034360

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16025000 屈 13B1X00048001577 入 1

異物除去と錆取りを 1 本で行える両頭タイプ。

針側では表層異物をはじき出すように使用し、のみ側では周囲の錆除去に使用いたします。

Quick
Service

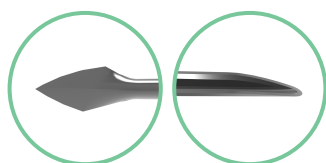

千種式両頭異物針

S-22 全長 116mm / 針幅 0.8mm / のみ幅 1mm ￥11,000 JAN:4547451034384

材 SUS 薬 クラス II JMDN 16025000 屈 13B1X00048001578 入 1

より微細な異物除去が行えるマイクロタイプの両頭異物針。


針部は、より細かな異物除去を可能とするようマイクロサイズに設計しております。のみ側では周囲の錆除去に使用いたします。

オート
クレープ
不可

Quick
Service

Best
Seller

S-226H S-226H

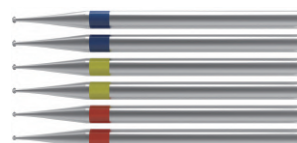

ハンド式マイクロモーターチャック（本体のみ）

S-226H 本体のみ 全長 125mm ￥49,500 JAN:4547451048244

材 SUS 薬 クラス II JMDN 32812000 承 16300BZZ00223000 入 1

ハンド式マイクロモーターチャック カッター 6 本入

S-226C 全長 37mm / 先端 青 0.8・黄 0.7・橙 0.6mm ￥20,000 JAN:4547451048220

材 SUS 薬 クラス II JMDN 32812000 承 16300BZZ00223000 入 6

振動やブレのない安定的な錆除去用の電動ドリル。

電動回転式のドリル。鉄片異物除去後の錆びを除去する際に使用します。振動やドリルのブレがなく、ドリル先端もマイクロサイズなため、角膜を損傷せず錆びを除去することができます。状況に応じて 3 種類の異なるドリルから最適なタイプを選択することが可能です。

M-02 霰粒腫・マイボーム腺用脂質除去（鋭匙・鑷子）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ


AtoZ

PICK UP

Best Seller



ED view

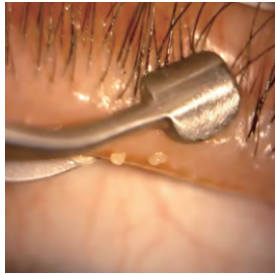

有田式マイボーム腺圧出鑷子

M-2073 全長 100mm / 先端 3.2mm ￥40,000 JAN:4547451335306



材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002378 入 1

優しく HOLD、しっかり圧出、究極の Painless 設計。


ご考案者 有田 玲子 先生（埼玉県 さいたま市 伊藤医院）コメント

「マイボーム腺開口部のタピオカサイン、Plugging を解除することは、マイボーム腺機能不全（Meibomian Gland Dysfunction, MGD）治療の第一歩です。毎日 MGD の患者さんばかりを集中的に診療している私が、患者さんの痛みを最大限に軽減するための先端部設計にこだわり、日本人の眼瞼厚にフィットし、力を入れなくても把持するだけで閉塞解除とマイバム圧出ができるようなハンドル設計を施しました。ぜひ、一度、手に取ってお試しください（^o^）」


Best Seller

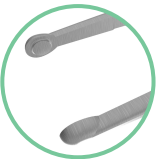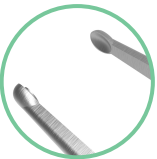




ED view

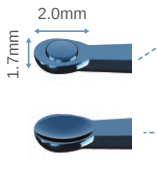

ED view

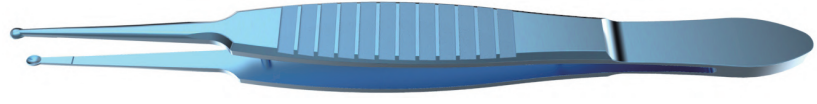

【使用イメージ】鋭匙などで内容物を摘出した後に残る残渣を、挟み込むように把持し、確実に取り除いていきます。

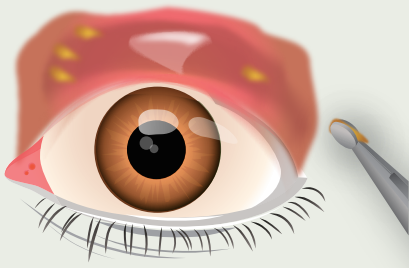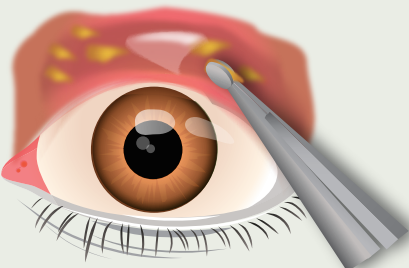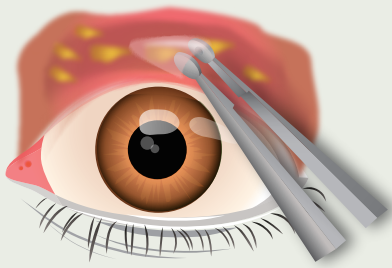

霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小

M-2187S 全長 106mm / 先端 1.7×2mm ￥38,000 JAN:4547451323402

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001654 入 1

霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小 チタニウム

M-2187S-T 全長 106mm / 先端 1.7×2mm ￥48,000 JAN:4547451329800

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002059 入 1



MOVIE

霰粒腫切開に必需品（簡単・確実・再発防止）

ご考案者 田島 康弘 先生（埼玉県 吉川市 たじま眼科・形成外科）コメント

「霰粒腫切開時に、脂質漏出後に内容物が残存します。この組織を鋭匙、ソーブや他のピンセットで把持して摘出することは難しいです。確実に摘出しないと再発の可能性があります。このピンセットは、先端部 1.7mm×2.0mm の鋭匙（小）にぼっち付きの蓋を付けた形状となっています。内容物を確実に挟み込んで摘出し、退治致します。また、先端部がしっかりしていますのでマイボーム腺の圧迫も可能です。霰粒腫切開のおともに、心強い味方です。」

Quick Service

Best Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼病

関連用品




サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

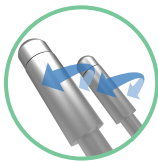

3D view

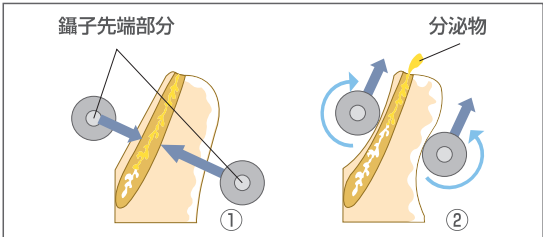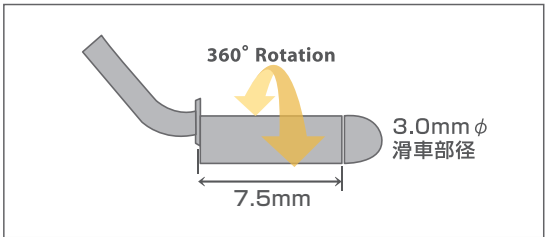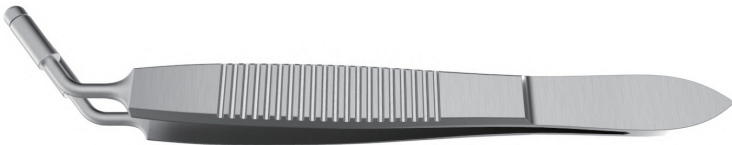

獨協医大式 滑車型マイボーム腺鑷子

M-2071 全長 97mm / 滑車径 3mm φ / 先端 7.5mm ¥60,000 JAN:4547451321002


材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001011 入 1

マイボーム腺は「絞り出す」という発想で簡単かつ痛みも軽減。

マイボーム腺の圧迫やマッサージの際、患者眼へのストレスを軽減させること等を目的に、鑷子の先端部に、360 度回転可能な 2 つの滑車を取り付けました。滑車で眼瞼を前面・後面から挟み、手前に転がしながら分泌物を絞り出す新発想により、これまでの課題であった圧迫時の痛みを大幅に軽減する事に成功しました。



3D view

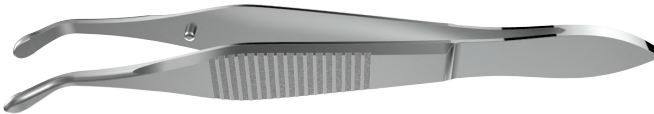

吉富式マイボーム腺鉗子 ワイドハンドル

M-2072 全長 87mm / 先端 2.9mm ¥42,000 JAN:4547451333777

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 届 13B1X00048002309 入 1

操作性と痛みの軽減を追求したマイボーム腺圧迫鉗子。

マイボーム腺が詰まっている際に、本製品によって瞼を前面と後面から挟みマイボーム腺を圧迫して内容物を排出させます。先端部は面で圧迫できるよう工夫されており、通常のピンセットで挟みこむよりも、患者への痛みを軽減させることが可能で、持ち手も握りやすく力の加減がしやすいワイドハンドルとなっております。



霰粒腫用丸型鋭匙

S-112 大 全長 127mm / 先端幅 3.0mm ¥20,000 JAN:4547451042938

S-112A 中 全長 127mm / 先端幅 2.5mm ¥20,000 JAN:4547451042945

S-113 小 全長 127mm / 先端幅 2.0mm ¥20,000 JAN:4547451042952

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 届 13B1X00048001173 入 1

3 種類のサイズから選べるスタンダードな霰粒腫用鋭匙。

霰粒腫用にカップが薄く、削り残しがないようにカップの淵のエッジが内側からつけられています。

memo

M-02

霰粒腫・マイボーム腺用脂質除去（鋭匙・鑷子）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



フィンク氏霰粒腫用ギザ付鋭匙

S-114 全長 124mm / 先端 2mm ￥23,000 JAN:4547451042969

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 屈 13B1X00048001175 入 1

内容物をしっかりと掻き出せるギザ付き鋭匙。

壁面を擦過するように内容物を掻き出すことが可能です。



スキール氏霰粒腫用ギザ付鋭匙

S-115A 全長 125mm / 先端 2mm ￥25,000 JAN:4547451327233

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 屈 13B1X00048001892 入 1

細かいギザでしつこい内容物を優しく、しっかりと除去。

壁面のしつこい肉芽種や残渣を擦過するように掻き出すことが可能です。ギザが細かい
ため、傷や瞼板の強度に対するリスクが軽減しております。

memo

PICK
UP

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品


サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



3D view

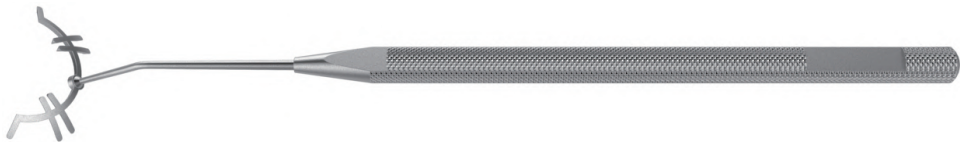


3ブロック切除法（横井法）必須の専用マーカー。

前モデル（M-1405）に比べて、子午線方向の左右各2本のラインの間隔が狭くなっています。弛緩した下方結膜を3つのブロックに分けて結膜切除を行う際に、一般に、耳側結膜の弛緩の範囲が広いと、より広い範囲を耳側に割り当て、かつ、それを左右眼で選択できるよう、左右に各2本のラインを設けています。実際の使用では、鼻側から1本目と3本目のラインを選択することで3つのブロックを作ることができます。また、マーキング用インクの塗布がより容易になるように、塗布面をより平滑に仕上げました。

横井氏カレーススマーカー エボリューション

M-1405A 全長 132mm ￥75,000 JAN:4547451323426

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001657 入 1

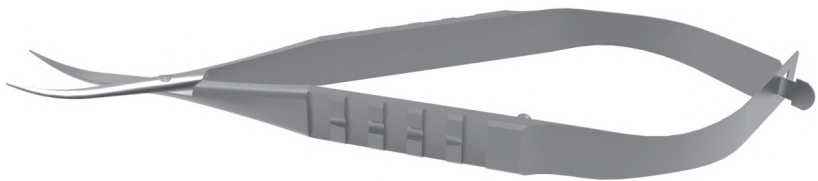

3ブロック切除法（横井法）必須の専用剪刀。

切断力をより強くするために、前モデル（M-1406）の刃の表裏をフラット形状と致しました。さらに刃の最先端部分に厚みを加えました。結膜下の組織のしごき出しが容易で、硬い線維組織（CPF：capsulopalpebral fascia）でも切除しやすい設計となっております。

横井氏カレースス剪刀 エボリューション

受 **M-1406A** 全長 108mm / 刃長 12mm ￥60,000 JAN:4547451323433

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001658 入 1

ご考案者 横井 則彦 先生（京都府立医科大学附属病院 眼科）コメント

「結膜は、ルーズな組織であるため、切開や切除を行うと、創縁のいずれの部位同士がもともと対応していたかが分かりづらくなります。カレーススマーカーは、結膜弛緩症に対して3ブロック切除法（横井法）を行う際の道しるべとして役立ちます。

本マーカーは、弧状の体部と4本の子午線方向の足からなりますが、実際の使用にあたっては、まず、下方の弛緩結膜の表面を周辺に向けてマイクロスポンジで軽く擦るようにして、弛緩結膜を周辺に寄せ集め、下方の球結膜表面に弛緩のない状態を作っておいてから、半側ずつ、押し付けるようにしてマーキングします。

弧状の結膜切開を終えた後、出血や弛緩のために創縁同士の対応を見失っても、足のラインをマーキングの直後の状態に合わせ直すことで、切開前の結膜の状態を再現することができます。

そして、次に各ブロックで結膜切除を行った後、輪部側の創縁の足のマークに向けて通針することで、的確な縫合を行うことができます。エボリューションタイプでは、長年の手術経験によって、最適の足の位置が決まると共に、塗布面が平滑になり、インクが塗りやすくなりました。すなわち、本マーカーをもって、カレーススマーカーは、最終完成版となりました。

カレースス剪刀は、カレーススマーカーの弧状の湾曲部と同様の曲率をもった部分と直線状の先端部分からなるため、これ一本で、弧状の切開と子午線方向の切開を行うことができる便利な剪刀です。

結膜弛緩症に対する3ブロック切除法（横井法）においては、傷んだテノン組織や、弛緩した硬いCPF（capsulopalpebral fascia、円蓋部挙上型結膜弛緩症の場合）をしごき出して切除する、結膜下組織の切除ステップが重要ですが、エボリューションタイプでは、剪刀の腰が強くなり、それが、容易にできるようになりました。本改良をもって、本剪刀も最終完成版となりました。」

M-04 翼状片（スパークテル・ゴルフ刀）

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニューラ

スパークテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品


サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ



view

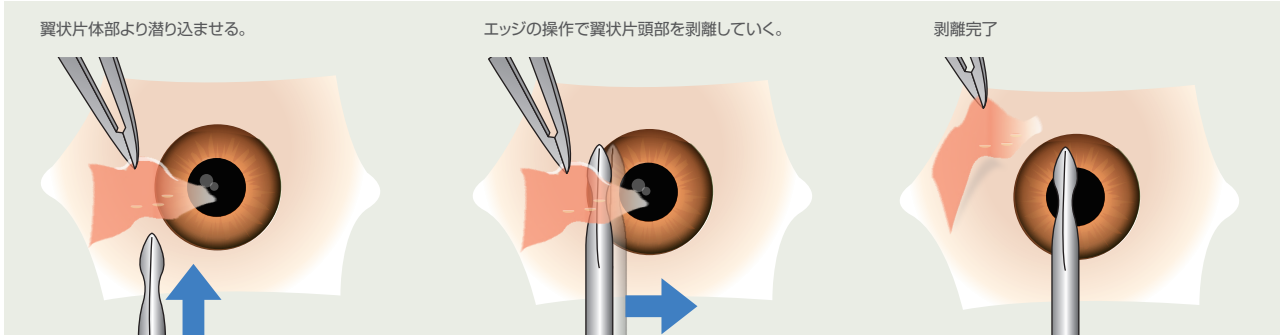

前田式翼状片スパークテル

受 M-1104 全長 110mm / 先端 1.5×0.1mm ￥26,000 JAN:4547451036395

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000204 入 1

翼状片を安全に容易に剥離する高機能スパークテル。

翼状片周囲の角膜上皮を除去後、体部に切開を入れ、翼状片下に本製品を挿入します。大きな鑷子でむしるように引き上げながら、癒着の強い頭部に向かって横の動きで鈍的に剥離する事が可能です。スパークテルの独特の形状は、翼状片の剥離をスムーズかつ安全に行えるよう、先端をやや鈍先に、そして側面は窪みをつけたエッジとなっており、増殖組織を引っかけるようスムーズに切断することが可能です。



ゴルフ刀

S-76 全長 117mm / 先端Φ1.8×0.3mm ￥15,400 JAN:4547451035572

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048000409 入 1

安全性と切断力を兼ね備えるゴルフ刀。

角膜の保護と切断力を兼ね備えたやや鈍的なゴルフ刀。翼状片手術などで特にパフォーマンスを発揮いたします。リユースのため、コストパフォーマンスに優れております。

memo

3種類のサイズから選べるネジ止め式挟眼器。

眼瞼処置などに有効となるように、眼球に沿ってカーブしています。ネジ式のため、挟眼の強度を調節することが可能です。また、操作性にも優れ、ワンアクションで素早く調節できます。大・中・小の3サイズからお選びいただけます。

デマル氏挟眼器

S-490RL	大	全長 95mm / 先端幅 31×19mm	¥ 28,000	JAN:4547451044024
S-490RM	中	全長 90mm / 先端幅 26×16mm	¥ 28,000	JAN:4547451044031
S-490RS	小	全長 88mm / 先端幅 20×13mm	¥ 28,000	JAN:4547451044048
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 届 13B1X00048000873 入 1				



Best Seller

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニキュ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

クント氏挟眼器

S-485L	大	全長 116mm / 先端幅 28×23mm	¥ 19,000	JAN:4547451034933
S-485M	中	全長 112mm / 先端幅 25×20mm	¥ 19,000	JAN:4547451034940
S-485S	小	全長 109mm / 先端幅 21×16mm	¥ 19,000	JAN:4547451034957
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 届 13B1X00048000137 入 1				




Best Seller

眼瞼の翻転にも適した汎用性の高いクロスアクション挟眼器。

クロスアクションタイプのため、ネジを締める手間がありません。挟眼部はカーブ形状ではなく、平面タイプなため、眼瞼を翻転させる手術にも適しており、霰粒腫などでは重宝します。大・中・小の3サイズからお選びいただけます。

下眼瞼挟眼器

M-2019L	大	全長 114mm / 幅 35×21mm	¥ 25,000	JAN:4547451327264
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 届 13B1X00048001894 入 1				

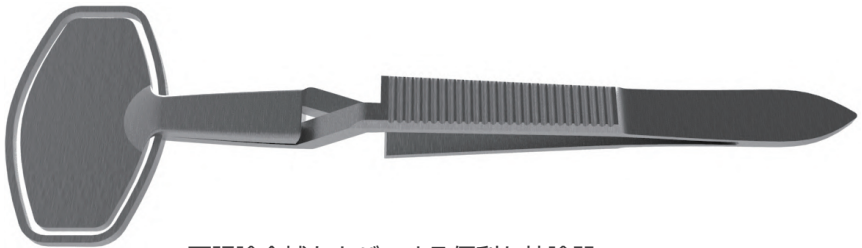

下眼瞼全域をカバーする便利な挟眼器。

ご考案者 中内 一揚 先生（兵庫医科大学病院 眼科）コメント

「今までの挟眼器より、更に横長形状で下眼瞼全域をカバーできます。これにより、内眦から外眦まで一度で切開することが可能です。Jones 手術や Hotz 手術を行うのに適しています。」

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

PICK
UP



炭酸ガスレーザーメス用挟眼器。

ご考案者 杉田 達 先生（東京都 葛飾区 杉田眼科）コメント

「炭酸ガスレーザーメスでは、従来の角膜保護用の金属コンタクトレンズで眼を保護すると、角膜糜爛や軟膏で、術後視力が一時的に低下するきらいがありました。この器具は、上眼瞼にクリップ状に挟んで簡便に固定することで、このような不快を生ぜずに、眼球保護が可能です。また、従来の挟眼器は助手が柄を保持していましたが、時として、柄の重さで眼瞼から外れたり、眼瞼に負荷がかかりやすいのが欠点でした。本器は助手に保持してもらう必要がなく、金属メスでの上眼瞼皮膚弛緩症や腫瘍の手術時にも簡便に使用できます。」

杉田式挟眼器
“上眼瞼手術用角膜プロテクター”



MOVIE

受	M-2051	全長 40mm / 幅 24×15mm	¥ 42,900	JAN:4547451037248
材	SUS	薬 クラス I JMDN 35801000	届 13B1X00048001514	入 1



デマル氏霰粒腫用挟眼器クロスアクション

S-489	全長 95mm / 幅 14×11mm	¥ 30,000	JAN:4547451044017						
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	35801000	届	13B1X00048001300	入	1

霰粒腫に最適なクロスアクション挟眼器。

挟眼面はフラットになっており、眼瞼の回転に適しております。またクロスアクション式のため、霰粒腫の処置中など、挟眼部の変更が素早く行えます。

エーゲル氏角板金属

S-247B 全長 111mm / 幅 22mm・19mm ￥6,600 JAN:4547451043669

材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 70944000 届 13B1X00048001493 入 1


シンプルな眼球保護用角板。

眼球の保護用に使用します。サイズの違う両端を状況に応じて使い分けることが可能です。



M-2216R

M-2216L

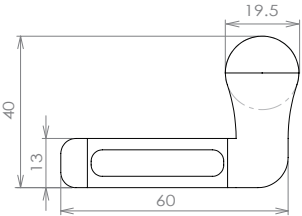

view

後藤氏固定式角板

M-2216R	右眼用	size: 図参照	¥ 15,000	JAN:4547451333500					
M-2216L	左眼用	size: 図参照	¥ 15,000	JAN:4547451333494					
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	70944000	届	13B1X00048002299	入	1

この角板、曲げて置くと安定します。

ご考案者 後藤 浩 先生（東京医科大学病院 眼科）コメント

「眼瞼や結膜の手術時に最も注意すべき合併症は、麻酔時の注射針や術中のメスによる角膜や強膜の穿孔である。この事故を未然に防ぐための器具として以前から角板があるが、従来のシンプルな形状では術者が一人でこれを把持して注射等の操作を行うには難があった。今回考案された固定式角板は、可変部を頬骨の形状に合わせて湾曲させることによって顔（ 瞼 ）部に留置できるように工夫されているため、助手の手を煩わせることなく確実に角板先端部を結膜門蓋部に挿入、固定することが可能となっており、より安定性、安全性の高い製品となっている。」

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスボーズブル

AtoZ



「経結膜的ミュラー筋タッキング用瞼板固定鑷子」

ご考案者 小林 真 先生（秋田県 北秋田市 小林眼科医院）コメント

「経結膜的ミュラー筋タッキング通糸法（Trans conjunctival Müller muscle tucking：TCMT）では、瞼板を終始確実に把持し続けることが手術手技全体において重要であるが、これまで専用の瞼板固定鑷子が無く、ペアン鉗子や眼筋固定鑷子等を代用せざるを得なかった。いずれの代用器具もサイズがまちまちで顕微鏡下での操作がしづらかったり、把持部の瞼結膜を挫滅させ、術後疼痛や異物感の原因となっていた。
本法専用のこの瞼板固定鑷子は、瞼板を確実に把持し二重翻転を容易にする他、3.0mm幅の鑷子先端部分を瞼板通糸のガイドマークとすることにより、安定したタッキングを可能とする。」

小林式 TCMT 用鑷子

M-2218 全長 110mm / 先端 3.0mm ￥52,000 JAN:4547451333784

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002308 入 1



MOVIE view



眼瞼下垂手術に便利な眼筋クランプ

操作性の良い鑷子タイプの眼筋クランプ。先端には片側 3 つの突起と穴があり、把持した際に嵌合します。
結膜ミュラー筋切除術 MMCR（Müller's muscle-conjunctival resection）が可能です。

YouTube 新前橋かしま眼科形成外科クリニックの YOUTUBE チャンネルを見る

パターマン氏眼筋クランプ

S-495 全長 96mm / 先端 3mm×25mm / 突起 0.9mmφ×1.1mm ￥46,200 JAN:4547451332893

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 屈 13B1X00048002257 入 1



MOVIE view

memo

M-07 開瞼鉤・開創器・釣針鉤

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針鉤
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ



デマル氏開瞼鉤

S-845RL	大	全長 142mm / 先端幅 17mm	¥ 13,000	JAN:4547451044284
S-845RM	中	全長 142mm / 先端幅 14mm	¥ 13,000	JAN:4547451044291
S-845RS	小	全長 142mm / 先端幅 11mm	¥ 13,000	JAN:4547451044307
受 S-845RE	未熟児用	全長 142mm / 先端幅 8mm	¥ 13,000	JAN:4547451044277


材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001375 入 1

4 種類のサイズで様々な切開創に対応。

一時的な開瞼や、切開部位の開口保持、眼瞼下垂手術時の術野の確保、または外傷性により開瞼が困難な場合など、様々な状況下で使用します。開瞼鉤は眼科のみならず、形成外科、美容外科においても使用されております。4 種類の鉤幅をラインナップしており、様々な切開創に対応できます。

平爪タイプのスライド式開瞼鉤。


DCR 鼻外法など、眼窩形成術時などに創口の拡張と固定に使用いたします。開創部は平鉤タイプとなっております。創口のサイズに合わせて、2 種類からお選びいただけます。

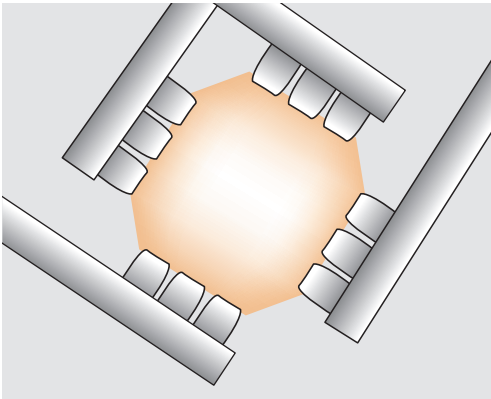


栗原式開創器 II

受 M-2012	四本平鉤	鉤幅 9.5mm	¥ 65,000	JAN:4547451032052
受 M-2013	三本平鉤	鉤幅 6.5mm	¥ 65,000	JAN:4547451032069

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70943000 屈 13B1X00048001565 入 1

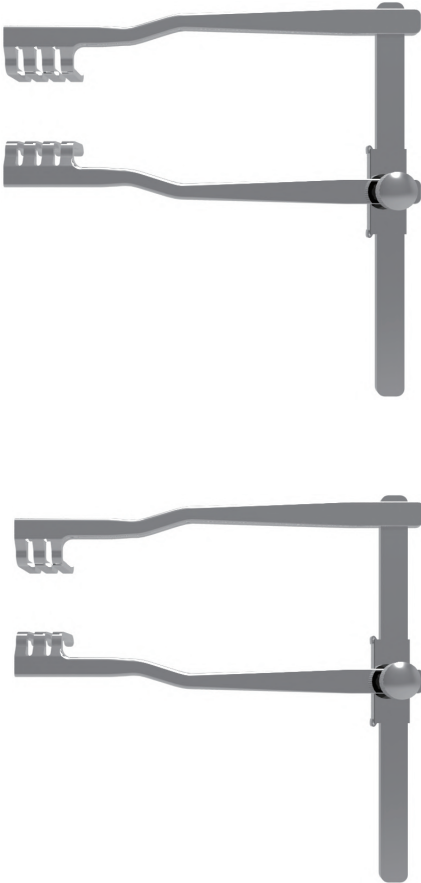

PICK UP

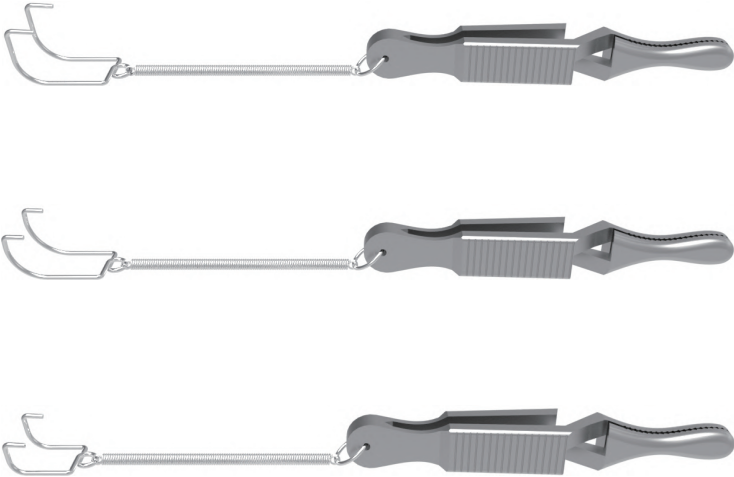

後藤・中村式 2 爪釣針鉤型開創器

M-2101L	大	幅 14.5mm	¥ 42,000	JAN:4547451321477
M-2101M	中	幅 13.5mm	¥ 42,000	JAN:4547451321484
M-2101S	小	幅 11.5mm	¥ 42,000	JAN:4547451321491

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70943000 屈 13B1X00048001324 入 1

局面に応じた理想的な開創を自在に実現するマストアイテム。

当社『中村氏 釣針型開創鉤』をモディファイした 2 本の鉤に、特殊スプリングと特殊クレンメを取り付け、眼瞼下垂手術をはじめ、眼形成術において皮膚切開創を開いた状態で固定することが可能となるよう設計されました。

ご考案者 後藤 浩 先生（東京医科大学病院 眼科）コメント

「中村氏 釣針鉤の特性と利便性を生かした眼付属器手術、特に眼瞼下垂手術の際の開創に便利なグッズです。ひとつで幅広の開創が可能です。また、従来の釣針鉤使用時に必要であった牽引用の糸や固定用の鉗子はもう要りません。」

- 鉗子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニユーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ

Best Seller



中村氏釣針型開創鉤（2 本組）

S-184L	大	幅 15mm	¥ 12,000	JAN:4547451033929
S-184M	中	幅 12.5mm	¥ 12,000	JAN:4547451033936
S-184S	小	幅 10mm	¥ 12,000	JAN:4547451033943

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000984 入 2

コストパフォーマンスに優れた利便性の高い開創鉤。

牽引の調節が便利なベーシックな開創鉤です。通糸後、鉗子などを用いて任意の方向、深さにて開創することが可能です。2 ケットで 3 種類のサイズよりお選びいただけます。

M-08 斜視（斜視鉤・眼筋クランプ）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ー

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

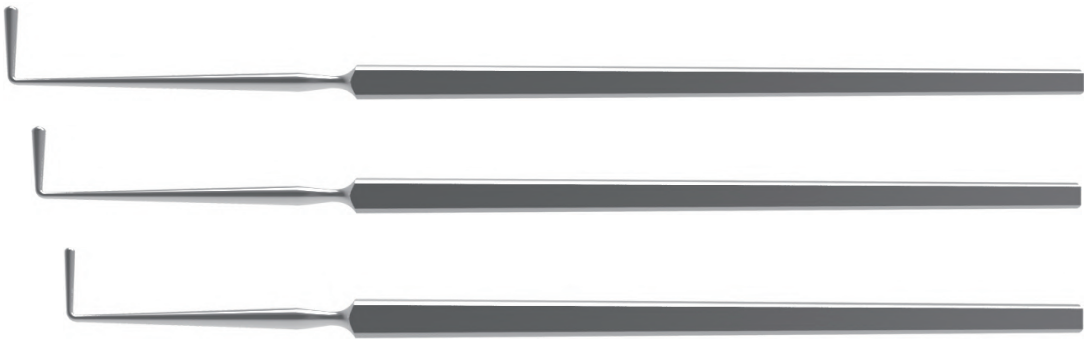


斜視鉤

S-152	大	全長 143mm	¥ 8,000	JAN:4547451047414
S-151	中	全長 139mm	¥ 8,000	JAN:4547451047407
S-150	小	全長 135mm	¥ 8,000	JAN:4547451047391
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 32767000	屈 13B1X00048000294	入 1

斜視鉤のスタンダード。

先端が平たく、丸いため、外眼筋にかけやすく、そして安全です。また滑って外れにくくなっております。3 種類のサイズよりお選びいただけます。

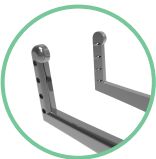

畑氏斜視鑷子

S-480R	右	全長 97mm	¥ 44,000	JAN:4547451044000
S-480L	左	全長 97mm	¥ 44,000	JAN:4547451043997
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 16209001	屈 13B1X00048001295	入 1

鑷子タイプの眼筋クランプ。

斜視手術の際に、外眼筋を本製品で固定し、眼筋の短縮や、付着部をずらす作業を行います。右用、左用がございます。



ベレンス氏眼筋クランプ

受 S-472	全長 90mm	¥ 69,000	JAN:4547451034872
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35801000	屈 13B1X00048000665

通糸孔のついた便利な眼筋クランプ。

斜視手術の際に、外眼筋を本製品で固定し、眼筋の短縮や、付着部をずらす作業を行います。短縮後の縫合が便利なよう、眼筋を挟んだ際に縫合針を通す孔を設けております。




近江・ベレンス氏眼筋クランプ 小児用 II 型

受 S-472-2	全長 65mm	¥ 72,000	JAN:4547451034896
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35801000	屈 13B1X00048000273

繊細な処置や小児の手術にも対応する小型眼筋クランプ。

より繊細な処置や小児などの斜視手術に対応するよう、全体的に小型化しておりますが、縫合針を通す孔は大きく設計されています。

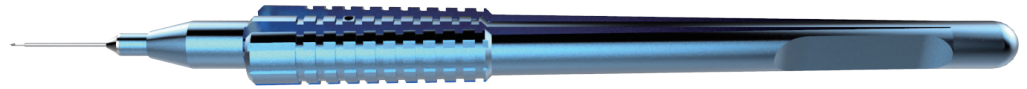専用
シリンジ
付属

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

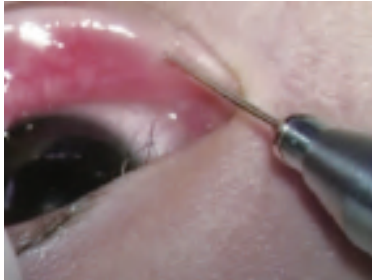

MOVIE

涙点を自在にコントロール。

ご考案者 三村 真士 先生（大阪医科大学病院 眼科）コメント

「涙小管を損傷することなく、涙点形成ができる涙点拡張用パンチです。涙点閉塞の症例でも容易に拡張できます。
涙点形成術から涙道内視鏡などの太い器具の挿入時にいたるまで、切除する回数を調整することで涙点の大きさを自由にコントロールできます。」

三村氏涙点形成パンチ 23G

DS-301 全長 134mm / シャフト 15mm / 23G ￥175,000 JAN:4547451333463

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 35285001 屈 13B1X00048002296 入 1

灌流と拡張を兼ね備えたイノベティブな一本。

ご考案者 藤本 雅大 先生 コメント

「本製品は涙管通水検査と涙道内薬液注入・涙点拡張の連続操作を可能としたものである。
洗浄針の全長が短く、支える手の固定も容易であり、初心者にも扱いやすい。患者さんが座った状態での通水検査も容易な形状と言える。」

利用する場面としては、通常の仰臥位での通水検査はもちろんのこと、座った状態での通水検査、涙道内視鏡検査や涙道手術前の涙道内薬液注入から涙点拡張の連続操作、また一時的に涙点拡張をして涙点狭窄がどの程度導涙機能に影響を及ぼしていたかを調べることができる。

使用法は、用途に応じて生理食塩水もしくは、薬液等を充填した 2.5ml シリンジに PDI ニードルをつける。ガーゼをあて、瞼縁に対して垂直に涙点へと挿入する。上涙点アプローチであれば耳上側に、下涙点アプローチであれば耳下側に指で牽引をかけた状態で、PDI ニードルを瞼縁に対して水平に倒し、涙小管水平部へと PDI ニードルの先を少し進めた状態で、通水を行う。涙点拡張を行う場合は、逆流した薬液等を拭き、再度牽引をかけた状態で行う。

涙点拡張の際に問題になるのは涙小管水平部における仮道形成であるが、薬液等で涙小管管腔を灌流して拡張した後に、連続して先端形状が鈍の PDI ニードルで涙点を拡張するため、仮道形成の可能性が低くなる。

下涙点から通水検査を行った場合の結果の解釈の例を挙げる。通水不能か下涙点のみから逆流がある場合は下涙小管閉塞であり、上涙点からの逆流がある場合は総涙小管以降の閉塞となる。逆流までのタイムラグ、逆流内容物によって、総涙小管閉塞か鼻涙管閉塞かを判断する。確定診断のためにはさらに涙道内視鏡検査を行うこととなる。」



MOVIE




view

PDI ニードル

M-2217 全長 30mm / シャフト 14mm / Φ 0.6mm- Φ 2.0mm ￥30,000 JAN:4547451334170

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048002330 入 1

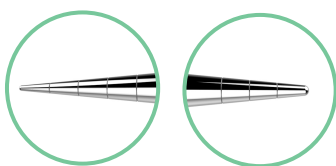

目盛り位置:1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm

先端0.5mm Φ

目盛り位置:2.5mm 2.0mm 1.5mm

先端1.0mm Φ

安全・正確な手術をサポートするガイド付き拡張針。

ご考案者 松村 望 先生

（横浜市 横浜相鉄ビル眼科医院 / 神奈川県立こども医療センター眼科）コメント

「涙道内視鏡手術や涙管チューブ挿入術などの経涙小管操作の際に、安全かつ正確な涙点拡張は、術者のストレスを軽減し、手術成功の鍵を握ります。本拡張針には以下の特徴があります。

- ① 直径 0.5 mm から 2.5 mm まで、0.5 mm 単位のゲージを参考に、正確で過不足のない涙点拡張が可能。
- ② 鋭端・鈍端ともに先端が研磨されて丸みがあり、涙小管内を傷つけにくい。
- ③ 従来品より短距離の挿入で涙点拡張が可能のため、大きな目の拡張が必要な場合や、涙小管閉塞で奥まで拡張針を挿入しづらい場合なども、より安全に涙点拡張が可能。
- ④ 涙点ならびに直径 0.5 ～ 2.5 mm の小孔の、内径の計測ゲージとして使用可能（涙点プラグのサイズ測定など）。

鋭端の最初の目盛り（直径 1 mm）まで涙点を拡張すれば、涙道内視鏡（直径 0.9 mm）は挿入できます。それより大きな拡張は、鈍端も利用できます。ご自身の術式や使用する器具に合わせて、ベストサイズの安定した涙点拡張が可能です。涙道手術の教育にも最適です。」

松村・大高式涙道手術用拡張針

S-189 全長 117mm / 円錐部 20mm / 17mm ￥22,000 JAN:4547451334552

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35010000 屈 13B1X00048002338 入 1

M-09 涙道（涙管拡張針・ブジー）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Quick
Service

Best
Seller



ヴィルダー氏涙管拡張針

S-186RL	太#3	全長 109mm / 先端 0.6mm	¥6,000	JAN:4547451043218
S-186RM	中#2	全長 109mm / 先端 0.4mm	¥6,000	JAN:4547451043201
S-186RS	細#1	全長 109mm / 先端 0.3mm	¥6,000	JAN:4547451043195
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35010000 屈 13B1X00048001181 入 1

3段階のアプローチで無理なく拡張。

涙小管を切開せずに、拡張させる目的で使用します。3種類のサイズよりお選びいただけます。ファインな細いタイプで徐々に拡張した後に、太いタイプで充分に拡張させます。

Quick
Service

Best
Seller



幼児用拡張針

S-186S		全長 80mm / 先端 0.5mm		¥6,000	JAN:4547451043225	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	35010000	屈 13B1X00048001182 入 1

デリケートな幼児用涙点拡張針。

幼児の涙点拡張が容易に行えるように先端部がデリケートになっております。



view

ボーマン氏涙管消息子

S-185A	0-01 (0.45/0.50)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451033950
S-185B	02-03 (0.55/0.60)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451033967
S-185C	04-05 (0.65/0.70)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451033974
S-185D	06-07 (0.75/0.80)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451033981
S-185E	08-09 (0.90/1.00)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451033998
S-185F	1-2 (1.10/1.20)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451034001
S-185G	3-4 (1.30/1.40)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451034018
S-185H	5-6 (1.50/1.60)	全長 130mm	¥3,000	JAN:4547451034025
S-185S	全サイズセット	全長 130mm	¥22,000	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35251000 屈 13B1X00048001500 入 1

Best
Seller



コストパフォーマンスに優れた涙管ブジー。

涙管に通して閉塞部位の解除や診断に用います。全 8 種類からお選びいただけます。また、全 8 種類セットもございます。



三宅式ブジー

M-1125	0-01 (0.45/0.50)	全長 140mm	¥11,550	JAN:4547451030706
M-1126	02-03 (0.55/0.60)	全長 140mm	¥11,550	JAN:4547451030713
M-1127	04-05 (0.65/0.70)	全長 140mm	¥11,550	JAN:4547451030720
M-1128	06-07 (0.75/0.80)	全長 140mm	¥11,550	JAN:4547451030737
M-1129	08-09 (0.90/1.00)	全長 140mm	¥11,550	JAN:4547451030744
M-1124	全サイズセット	全長 140mm	¥51,700	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35251000 屈 13B1X00048001488 入 1

器具の操作性に優れるラウンドハンドルタイプ。

涙管に通して閉塞部位の解除や診断に用います。ラウンドハンドルのため、器具の回転操作が容易に行えます。全 5 種類からお選びいただけます。また、全 5 種類セットもございます。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

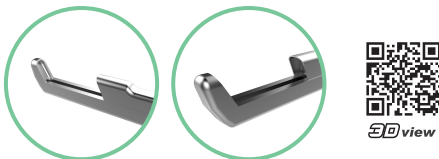

よりパワフルな骨削開を可能とするケリソンロンジャー。

ご考案者 目黒 泰彦 先生 コメント（仙台市 仙台南みだの眼科クリニック）


「DCR 鼻内法のポイントとして、骨窓を大きく作成し涙嚢を広く展開する事が重要とされています。今回、よりパワフルな骨削開を目的としたケリソンロンジャーを開発しました。従来の彫骨器に比べ先端の開口部が大きく強靱な構造をしているのが特徴で、上顎骨の効率的な削開に有用です。骨窓の大部分をケリソンで作成することが可能であり、手術時間の大幅な短縮が望めます。またノミによる骨亀裂や、ドリルによる涙嚢穿孔といった副損傷のリスクを最小限に低減させることも期待できるでしょう。使用のコツとして、中鼻甲下端に近い低位の涙骨上顎骨縫合 (maxillary line) に先端部を滑り込ませ、外上方に向かい骨窓を拡大してゆく方法を推奨します。本製品が DCR の効率化・低侵襲化の一助となる事を願ってやみません。」



目黒式 DCR ケリソンロンジャー（直）Hercules

受 M-1820 全長 265mm / 可動部 200-216mm / 先端幅 3.5mm 120° オープン価格 JAN:4547451335467
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32853000 屈 13B1X00048002389 入 1

50% 縮小表示

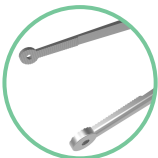

福島医大式オルビタ用腫瘍把持鑷子

受 M-2103 全長 166mm / 先端 3mmφ ￥60,000 JAN:4547451321514
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001349 入 1

眼窩形成術における狭くて深い術野に最適な 1 本。

眼窩形成術において、手術中の視認性と操作性等を考慮し、パイオネット型に設計致しました。また、腫瘍等をよりデリケートにかつ、しっかりと把持出来るよう、先端部がセレーション加工・リング状となっています。

ご考案者 古田 実 先生（福島県立医科大学附属病院 眼科）コメント

「眼窩の手術は顕微鏡下にて行われることが推奨されていますが、狭くて深い術野に対する適切な器具を得ようとするれば、脳神経外科のカタログから選ぶしかありませんでした。しかしワーキング・レンジスが合わない器具や 把持力が弱い器具しか選択肢にない場合もあり、ストレスを感じておりました。今回考案したオルビタ用腫瘍把持鑷子は、以下の点に留意して製作していただきました。

- ① ワーキング・レンジスが 40mm であること。
- ② パイオネット型で、重量バランスがよいこと。
- ③ 鋼材の硬度が高く、把持力が強いこと。
- ④ 先端の滑り止め用の溝が精密にかみあうこと。

特に眼窩深部病変などの難治症例にお役立てください。」

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

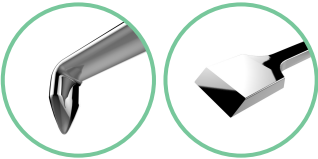

MOVIE

中内式骨膜剥離子

受 **M-2018** 全長 162mm / 先端 3mm・6mm ￥27,000 JAN:4547451324287
材 SUS 薬 クラス I JMDN 70952000 屈 13B1X00048001713 入 1

より安全に骨窓アプローチが行えるL字型剥離子。

ご考案者 中内 一揚 先生（兵庫医科大学病院 眼科）コメント

「DCR 鼻外法において、安全な骨窓アプローチができるL字型骨膜剥離子です。先端はやや鈍になっており、鼻粘膜を損傷せずに、涙嚢窩の縫合線に差し込み、骨窓を作成することができます。ロンジャー、ドリルと組み合わせることで、さらに安全な骨窓作成が可能です。対側は皮切部直下を上顎骨のカーブに沿って骨膜剥離が行なえるような大きさの剥離子に仕上げられています。」



スケペンス・フリーマン型レトラクター

S-120D 全長 135mm ￥14,300 JAN:4547451033493
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000376 入 1

折り曲げ可能で眼球摘出時にも便利。

任意に折り曲げて使用することが可能です。先端が開いているため、視認性が良いのが特徴です。眼球展開用として視神経切断時のガイドとしての活用や、溝からロカリゼーターでマーキングや、直筋をかけるなど用途はさまざまです。



鈍



S-123B



鋭



S-123S

S-124B

S-124S

アクセンフェルド氏涙嚢摘出鉤

S-123B	2爪 鈍	全長 142mm / 先端幅 5mm	￥26,000	JAN:4547451335979
S-123S	2爪 鋭	全長 142mm / 先端幅 4mm	￥26,000	JAN:4547451335962
S-124B	3爪 鈍	全長 142mm / 先端幅 7.5mm	￥26,000	JAN:4547451335993
S-124S	3爪 鋭	全長 142mm / 先端幅 7.5mm	￥26,000	JAN:4547451335986

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70943000 屈 13B1X00048002429 入 1

DCR 鼻外法では欠かせない鉤。

先端部が2爪の鉤は、特に局所的な部位の視野確保に便利。3爪の鉤は、広く組織を手繰り寄せる時に便利です。

S-123B



view

S-123S



view

S-124B



view

S-124S



view