

手術顕微鏡第二アームバランス調整方法について

2021/07/01

1. 内容

L-0990、L-990A 手術顕微鏡において、第二アームが上がりすぎたり下がりすぎたりする場合、バランス調整ハンドルを回すことで調整が行えます。

2. 調整方法

- ① バランス調整ハンドル（A）を回してバランスを調整してください。
- ② アームを固定したい場合は固定ハンドル（B）より締付固定してください。
※アームを上下に稼働させる場合は固定ハンドルを緩めてください。ストッパーの金属が削れ、故障の原因になります。

