
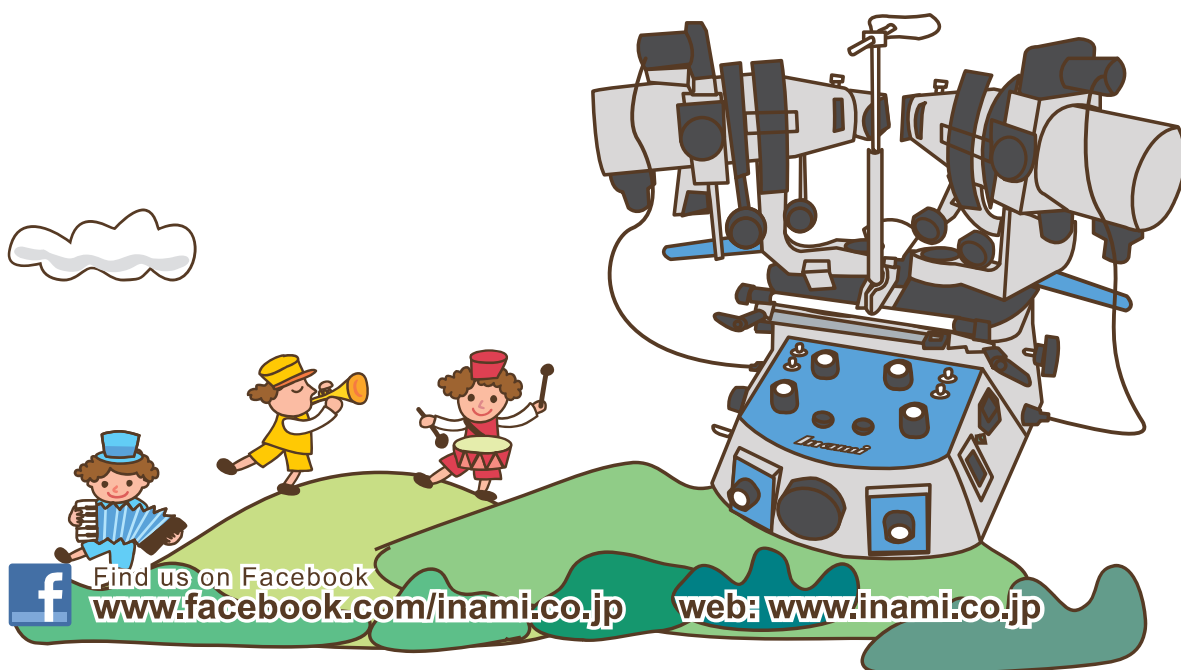
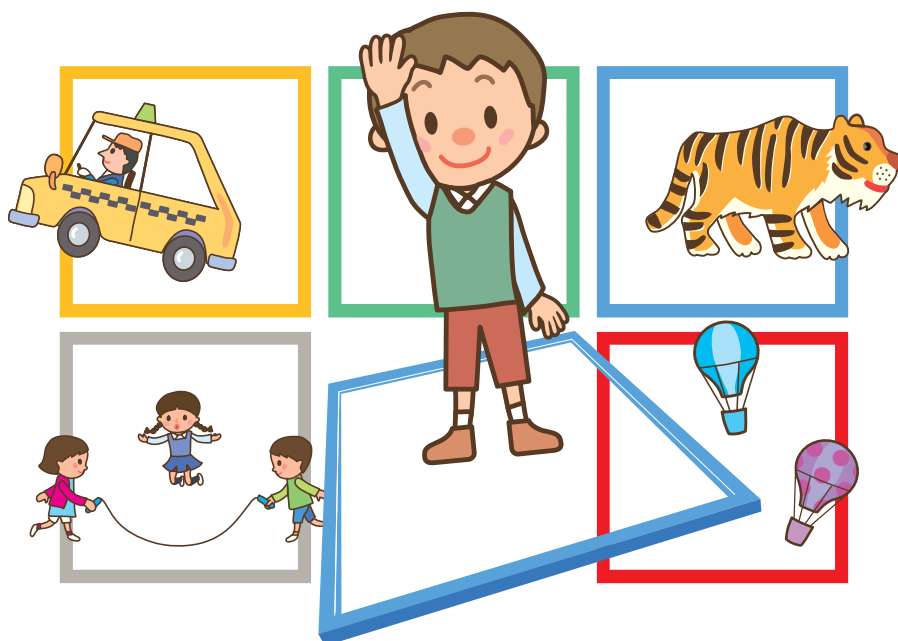


Synoptiscope


L-2510B

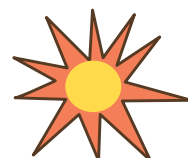

Find us on Facebook

www.facebook.com/inami.co.jp

web: www.inami.co.jp

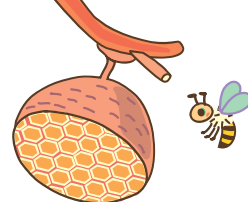

Synoptiscope L-2510B

イナミのシノプチスコープは、斜視や弱視などの両眼視機能に関わる疾患の診断及びトレーニング用に設計されており、以下の3種類の検査に対応しています。


- ✓ 同時視
- ✓ 融像視
- ✓ 立体視

精巧な機械加工と鋳物による堅牢なボディが正確な検査を長期にわたりサポートします。



L-2510B
シノプチスコープ

L-25B-7000 
ハイデンガーブラシ装置

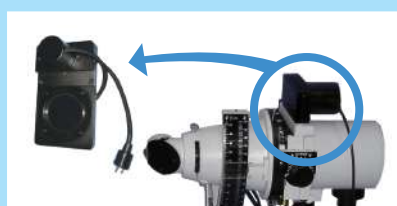


ハイデンガーブラシ装置は取り外し可能で、回転のスピードは50から100rpmです。
また、ノイズ低減構造が採用されています。



自動点滅装置の点滅速度は30から100回毎分で調節が可能です。手動の点滅はコントロールパネル上のボタンによって行うことができます。

自動点滅

左側	右側
フリッカー	—
—	フリッカー
フリッカー	点灯
点灯	フリッカー
同時フリッカー	
交互フリッカー	

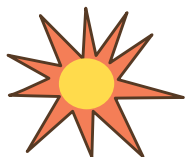

子供たちの笑顔のために

豊富な種類の標準スライドは子供向けイラストの専門イラストレーターとのコラボレーションによってデザインされました。

イラストのモチーフや色は子供の興味を惹くことや長い間集中させること、また検査に対するストレスの軽減を目的に慎重に選定されています。



54枚(27ペア)の標準スライドはウレタン製の特別アルバムに安全かつきれいに保管することができます(アルバム3冊/セット)。



スライドイラストレーター



まつなが あき

子供向けの絵本、教材、雑誌イラスト、グラフィックデザイン、パッケージデザインなどの分野にて活躍しているプロのイラストレーター。国内にとどまらず、近年は国際的な評価も高まっている。コマーシャルベースの制作以外にも、個人のプロジェクトとして定期的に絵画、ドローイング、写真などの作品も発表している。



より簡単な角膜反射の観察を可能にするため、接眼部はカバーを開けることでハーフミラーに変えることができる仕様となっております。

この機構は遠点固視をさせる際にも役立ちます。



側面がペイントされたポインターにより、目盛り板に顔を近づけることなく簡単かつ正確に数値を読むことができます。




大きなサイズのノブの採用により、スムーズなランプハウスの動きが実現されました。



スライド L-25S

シノプチスライドセット

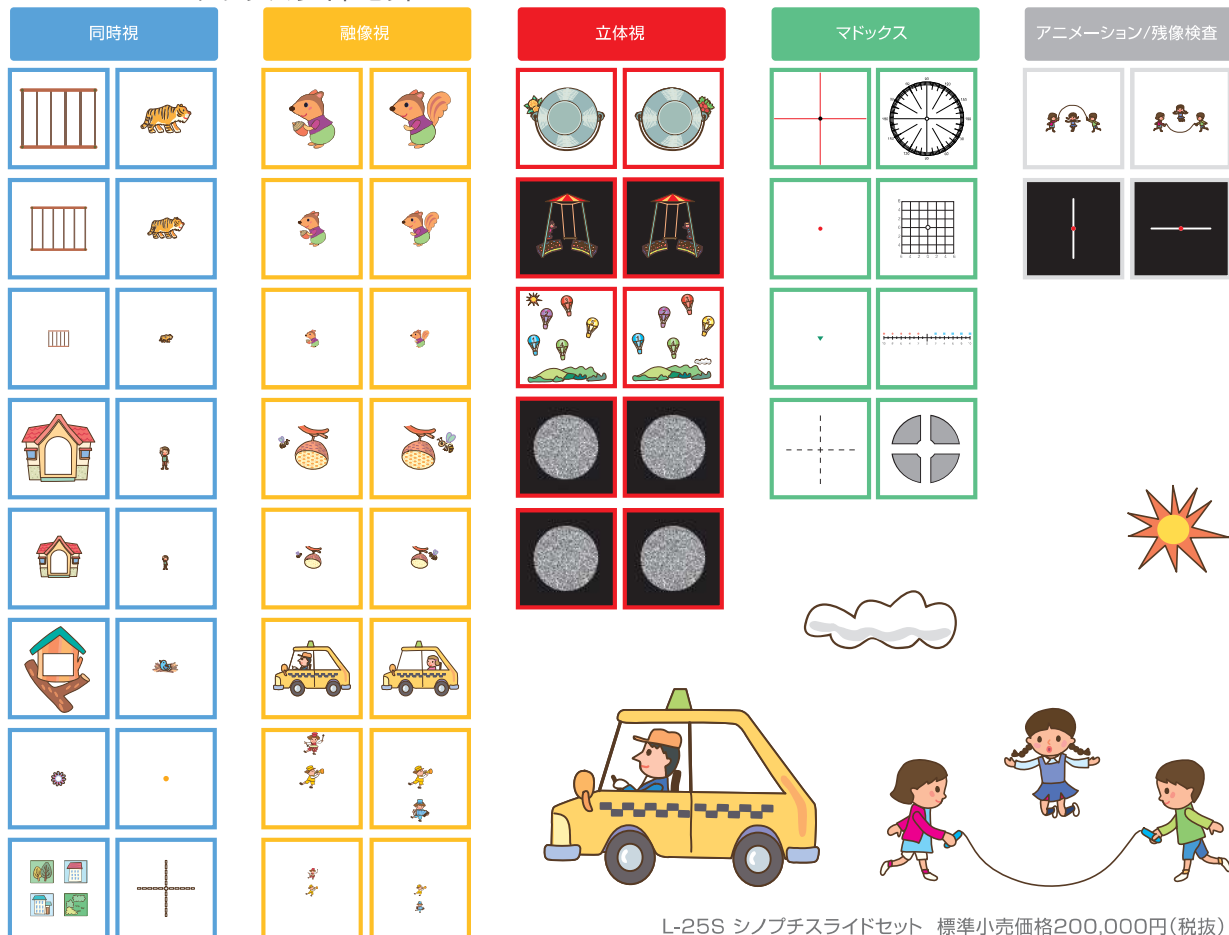

L-25S シノプチスライドセット 標準小売価格200,000円(税抜)
スライド別売り(2枚1組セット) 標準小売価格12,000円(税抜)

主な仕様

型式	L-2510B	L-2510B+L-25B-7000 (ハイドンガーブラシ装置)
標準小売価格(税抜)	1,600,000円	1,800,000円
瞳孔距離調整幅	45 mm ~ 80 mm	
顎受け位置調整	上下移動量 60mm / 前後移動量 45mm	
鏡頭回転範囲	仰角回転角度	30°(目盛 1°±0.125°)
	俯角回転角度	30°(目盛 1°±0.125°)
	輻輳偏位角度	50°(目盛 1°±0.5°)
	開散角度	40°(目盛 1°±0.5°)
スライド回旋角度	20°(目盛 1°±0.5°)	
自動点滅装置	速度調整範囲 30 ~ 150 回 / min	
手動点滅装置	押しボタンスイッチ	
無段階視野絞り装置	—	Φ10~50 mm
ハイドンガーブラシ	※ ¹ オプション	50 ~ 100 回転/min
電球	8V 0.75A(L-2510-K1)	8V 0.75A(L-2510-K1)
電球(ハイドンガーブラシ)	—	8V 3A(L-3710-V0)
使用電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	26VA	64VA
寸法(mm)	550(W)×320(D)×392(H)	550(W)×320(D)×425(H)
重量	15kg(本体)	18kg(本体)

※¹ L-25B-7000 ハイドンガーブラシ装置 標準小売価格200,000円(税抜)
L-2510-K1 シノプチ球(白球)8V0.75A 標準小売価格2,200円(税抜)
L-3710-V0 シノプチHB球8V3A 標準小売価格2,200円(税抜)



A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我麻町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

official web site



製造販売業許可番号 13B1X00048
v1.4

※本カタログ記載価格は、すべて2023年1月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。