

TRIAL LENS SERIES

検 眼 レ ン ズ シ リ ー ズ



www.inami.co.jp

 Find us on Facebook!
www.facebook.com/inami.co.jp

「美」を追及した、多機能キャビネット Armor Cabinet



35/40対メニスカスレンズ

35/40対メニスカスレンズがセットされております。
品質の高いメニスカスレンズを実現しております。
(レンズ径38φ)



スライドボード

スライド式のテーブルを利用することで、十分なワークスペースが確保できます。キーボードの設置やカルテ台としても利用することが可能です。また、使いやすさを追及した高さ設計も特徴です。



スッキリ収納

左右の引出しを使えば、検眼フレームなどをスッキリ収納できます。
また、ラックの棚位置もお好みに応じて調節が可能です。スムーズな診察、そしていつでも美しい診療空間を創出します。



モニターアーム

ファイリングソフトを併用する場合など、専用のアームを使用し、モニターを設置することが可能です。
フレキシブルなアームが、モニターをお好みの角度に調節します。
※耐荷重:~12kg




Armorベース

キャビネットタイプではなく、デスクの上に平置きしたいというニーズにお応えて、平箱タイプを単体販売しております。
省スペースでの診察をサポートいたします。



検眼レンズのLとR

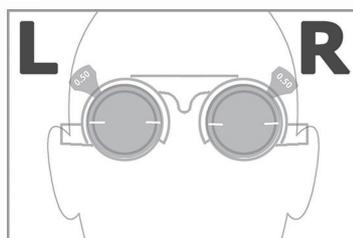

検者からみて
右側に使用するのがR
左側に使用するのがL


価格 (税別標準小売価格)

PYS-91-35A	Armor キャビネット 35対セット	¥ 560,000
PYS-91-40A	Armor キャビネット 40対セット	¥ 620,000
PYS-89-35A	Armor ベース 35対セット	¥ 460,000
PYS-89-40A	Armor ベース 40対セット	¥ 520,000
3NM-35L	Armor テストレンズ 35対セット (レンズのみ)	¥ 385,000
3NM-40L	Armor テストレンズ 40対セット (レンズのみ)	¥ 445,000


JMDN:34653000 届出番号:13B2X1036900TL2S

PYS-91	キャビネット (レンズなし)	¥ 175,000
PYS-88	ベース (レンズなし)	¥ 75,000
PYS-90-MA	オプションモニターアーム (ポール含む)	オープン価格

仕様

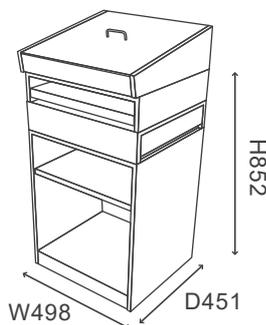


外寸法/ H1007・D451・W498mm
スライドボード/ W460・D377mm
引出し/ 2ヶ(左1・右1)
仕切り板/1枚 (MAX500W)
底面キャスター/ 4ヶ
付属レンズ/ メニスカス(35対 or 40対)

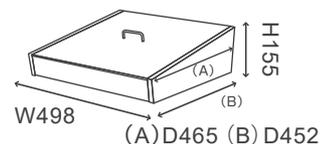

注目の累進対応検眼レンズ

近年の加速度的な高齢化社会に伴い、累進需要者は比例して増加しつつあります。
 眼科施設においても、累進(遠近両用)レンズを用いた検眼の需要が高まっております。
 (総務省の統計では、2025年には全人口の約48%が65歳以上となる報告が上がっております。)
 ※ 累進レンズとは、1枚のレンズの中での境界線がなく、度数が徐々に変化するレンズを指します。
 ※ 患者様の状態とレンズの組合せによって、近々、中近、遠近の処方が可能です。

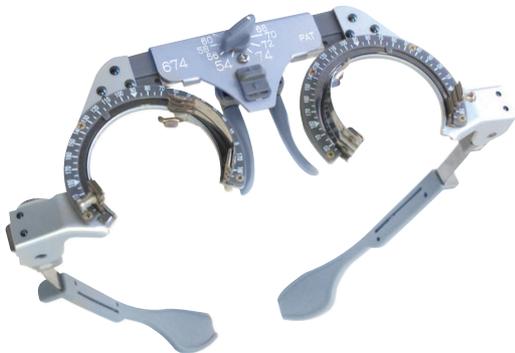

専用検眼フレーム

前面と後面に検眼レンズが装着できる仕様となっております。前面には、通常の見眼鏡、後面には累進見眼鏡を装着します。

累進レンズセット

レンズ下部にのみ、度が入っており、上部は度なしの素通し使用となっております。
 22枚入り +1.00 ~ +3.50 (11度数 / 0.25 間隔)



価格 (税別標準小売価格)

674-LO	累進レンズ用試験枠PD調整付	¥ 21,400
--------	----------------	----------


JAN:4571209675734 JMDN:37071000 届出番号:13BX00177000016

価格 (税別標準小売価格)

PYS-95-11	累進レンズセット クーラ 11対	¥ 137,000
-----------	------------------	-----------

JAN:4547451328612 JMDN:34653000 届出番号:13B1X00048001971


使用方法

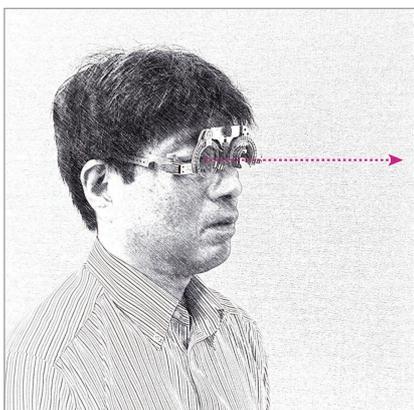

① 通常測定(例 5m)
通常見眼鏡装着





② 近見測定(≒30cm)
通常見眼鏡装着

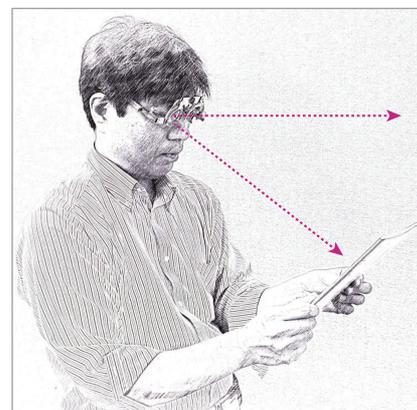

③ 近見測定(≒30cm)
通常見眼鏡+累進見眼鏡装着

検眼フレーム前面に装着した通常見眼鏡で、度数を測定(①)した後、そのまま近見を測定(②)します。近見が見えづらい場合、後面に累進見眼鏡を重ねて装着し、近見の矯正(③)を行います。その際、前面の通常見眼鏡は外しません。

処方例

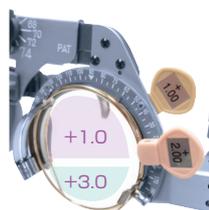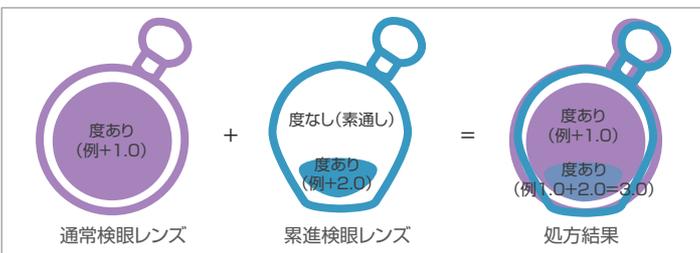

この場合の累進レンズの処方、
 ① +1.0
 ② +3.0 (通常レンズ1.0+累進レンズ2.0)

PD調節が可能な万能試験枠。

PD調整が可能のため、あらゆる患者さまに最適な設定が可能です。
また、高い耐久性と、被験者のストレスを最大限軽減する軽量設計も特長です。

価格 (税別標準小売価格)

K-0391	万能試験枠 Black	¥ 36,000
JAN:4547451081722 JMDN:32791000 届出番号:13B1X00048000216		
K-0391-G	万能試験枠 White	¥ 36,000
JAN:4547451321019 JMDN:32791000 届出番号:13B1X00048000216		
K-0391-V	万能試験枠 Violet	¥ 36,000
JAN:4547451321033 JMDN:32791000 届出番号:13B1X00048000216		

瞳孔距離：48～80mm
角膜測定目盛り：2mm間隔
フレーム角度調整：35°(上方向30°±5° / 下方向5°+5°-2°)
フレーム長さ調整：35mm
最大レンズ枚数：10枚(片側5枚)
レンズ角度：0°±5° / 180°±5°



レンズ一覧 (Armorキャビネット・Armorベース共通) ※Sレンズ・Cレンズは、マイナス、プラスともに2枚ずつセットされております。

スフィア(S)

	40対	35対		40対	35対
0.12	2	2	4.25	2	2
0.25	2	2	4.50	2	2
0.37	2		4.75	2	2
0.50	2	2	5.00	2	2
0.62	2		5.25	2	2
0.75	2	2	5.50	2	2
0.87	2		5.75	2	2
1.00	2	2	6.00	2	2
1.25	2	2	6.50	2	2
1.50	2	2	7.00	2	2
1.75	2	2	8.00	2	2
2.00	2	2	9.00	2	2
2.25	2	2	10.00	2	2
2.50	2	2	11.00	2	2
2.75	2	2	12.00	2	2
3.00	2	2	13.00	2	2
3.25	2	2	14.00	2	
3.50	2	2	16.00	2	2
3.75	2	2	18.00	2	
4.00	2	2	20.00	2	2

シリンダー(C)

	40対	35対
0.25	2	2
0.50	2	2
0.75	2	2
1.00	2	2
1.25	2	2
1.50	2	2
1.75	2	2
2.00	2	2
2.25	2	
2.50	2	2
3.00	2	2
3.50	2	2
4.00	2	2
4.50	2	
5.00	2	

プリズム

	40対	35対
0.5	2	2
1	2	1
2	1	1
3	1	1
4	1	1
6	1	1

アクセサリ

	40対	35対
グリーンレンズ	1	1
レッドレンズ	1	1
ブルーレンズ	1	1
ブラウンレンズ	1	1
ピンホール (0.5)	1	1
ピンホール (1.0)	1	1
ピンホール (1.5)	1	1
ピンホール (2.0)	1	
スリット (0.5)	1	1
スリット (1.0)	1	1
スリット (1.5)	1	
平面	2	2
マドックス 赤	1	1
フロスト	1	
クロスライン	1	
遮光板	1	1

価格 (税別標準小売価格)

3NMS-A	Armor テストレンズ スフィア S±0.12-S±10.00	¥ 3,250
3NMS-B	Armor テストレンズ スフィア S±11.0-S±14.0	¥ 3,950
3NMS-C	Armor テストレンズ スフィア S±16.0-S±20.0	¥ 3,950
3NMC-A	Armor テストレンズ スフィア C±0.25-C±3.00	¥ 4,750
3NMC-B	Armor テストレンズ スフィア C±3.50-C±5.00	¥ 5,300
3NMP-A	Armor テストレンズ スフィア プリズム 0.5°～1°	¥ 4,380
3NMP-B	Armor テストレンズ スフィア プリズム 2°～4°	¥ 4,380
3NMP-C	Armor テストレンズ スフィア プリズム 6°	¥ 4,380
3N-4	グリーンレンズ	¥ 3,000
3N-4	レッドレンズ	¥ 3,000
3N-4	ブルーレンズ	¥ 3,000
3N-4	ブラウンレンズ	¥ 3,000

3N-3	ピンホール(0.5)	¥ 2,130
3N-3	ピンホール(1.0)	¥ 2,130
3N-3	ピンホール(1.5)	¥ 2,130
3N-3	ピンホール(2.0)	¥ 2,130
3N-2	スリット(0.5)	¥ 2,130
3N-2	スリット(1.0)	¥ 2,130
3N-2	スリット(1.5)	¥ 2,130
3NMS0.00	平面	¥ 3,200
K-1281	マドックス 赤	¥ 4,000
3N-5	フロスト	¥ 3,000
3N-6	クロスライン	¥ 3,200
3N-1	遮光板	¥ 2,150

JMDN:34653000 届出番号:13B2X1036900TL2S



A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我麻町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※本カタログ記載価格は、すべて2025年2月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。