

INAMI PICK-UP NEWS

Vol. **10**
2025
Inami

「**視えない視野**」を、**視る力**。



HOT NEWS

52nd

**この視野計があるから
見える世界がある。**

販売開始から半世紀以上。

ゴールドマン型視野計（GP）は、50年以上にわたり臨床の最前線で使われ続けてきた機器です。

この長い年月が示すのは、技術の古さではありません。

むしろ、「この機器でなければ描けない視野が、確かに存在する」という、揺るがぬ信頼の積み重ねです。

現在、このGPを製造し続けているのは、世界でもイナミだけ。

私たちは、変化する医療の中でも、変えてはならない機器の価値を守り続けています。視野検査は、見えている世界を科学的に可視化する唯一の方法です。

その中でも、静的視野計では届かない領域が確かに存在します。

それを描き出すのが、ゴールドマン型視野計（GP）です。

技術の継承、部品供給、安定性へのこだわり。

そのすべてに、視野検査の責任を果たすという信念があります。



ゴールドマン型動的量的視野計だからできること!!



- ✓ 片眼 最大90度の周辺視野を描出。
- ✓ 静的検査では測定困難な、末梢視野・進行緑内障に対応。
- ✓ 日常生活に必要な“生きる視野”の有無を見極める。



現行GPをご使用中の施設様へ

ドーム内の定期清掃、されていますか？

正確な視野検査のために、専門対応が必要です。

ゴールドマン型視野計（GP）のドーム内部には、検査中に飛散した患者の唾液などが、気づかぬうちに付着・蓄積します。これが微妙な光の乱反射や背景ムラの原因となり、検査精度の低下につながることがあります。

ドームは光学的に非常に繊細な構造のため、市販のクリーナーや自己流の清掃は厳禁です。傷やムラが残る恐れがあり、かえって機器を劣化させてしまいます。

専門のサービスマンが、現地で清掃対応いたします。

イナミでは、現行GPをご使用中の施設様に向けて、


専門のサービスマンによる定期清掃サービス

（訪問対応・有償）を実施しています。

* 清掃対応は有償サービスとなります。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。



L-1560 視野計ゴールドマン型 ペリメーター

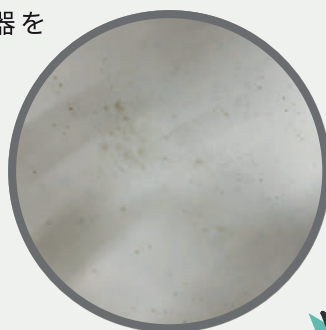

ドーム内に付着した汚れ

BEFORE



ドーム内清掃後

AFTER

🔧 ご希望の日時に訪問

🔧 機器をお預けいただく必要なし

🔧 作業は短時間で完了



旧型GPをご使用中の施設様へ

!! 検査精度、確保できていますか？

旧型GP（赤色メインスイッチ）を長年ご使用の施設様で、以下のような症状が見られる場合はご注意ください。

- ドーム内部に、清掃では取り切れない汚れが蓄積
 - 調光ボリュームを最大にしても、光量が1430LUX(1000ASB)未満
 - アーム部の歪みにより、動きが悪く基準点がずれている
- これらの状態は、視野検査の精度を大きく損なう原因となります。さらに、旧型機は製造から長い年月が経過しており、現在は工場修理の対応を終了しております。



現行モデルへの更新をおすすめします!!


現行のゴールドマン型視野計は、旧型と同じ基本設計を守りつつ、

● 光量の安定性 ● 精密な動作 ● 継続的な部品供給

といった点で、より安心してお使いいただける仕様となっております。

正確な視野検査を、これからも安定して行っていただくために。

ぜひこの機会に、更新をご検討ください。

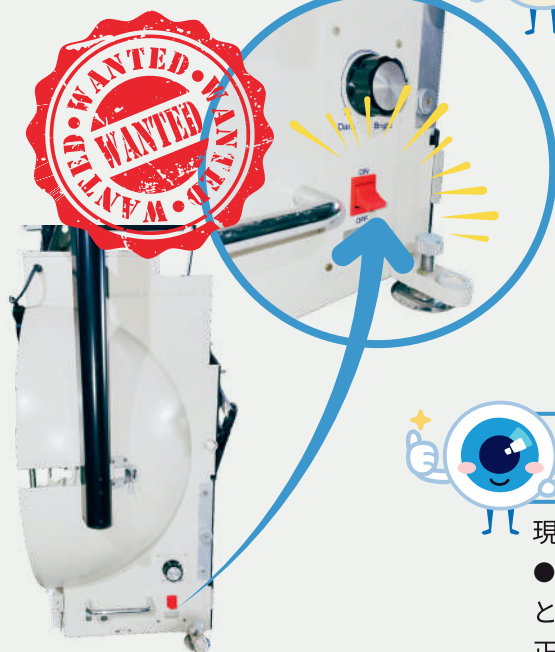

株式会社 イナミ

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL:03-3814-1731 FAX:03-3814-3334
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我麻町285A1 TEL:052-934-7489 FAX:052-934-7490
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL:0798-37-2880 FAX:0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL:092-504-1734 FAX:092-504-5355

※本カタログ記載価格は、すべて2025年8月現在の税別価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品画像は実寸ではございません。本カタログ記載サイズにてご確認ください。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。 2025/06/v1.0

