

TRIAL LENS SERIES

検 眼 レ ン ズ シ リ ー ズ



www.inami.co.jp



Find us on Facebook!

www.facebook.com/inami.co.jp

「美」を追及した、多機能キャビネット Armor Cabinet




35/40対メニスカスレンズ

35/40対メニスカスレンズがセットされております。
品質の高いメニスカスレンズを実現しております。
(レンズ径38φ)




スライドボード

スライド式のテーブルを利用することで、十分なワークスペースが確保できます。キーボードの設置やカルテ台としても利用することが可能です。また、使いやすさを追及した高さ設計も特徴です。

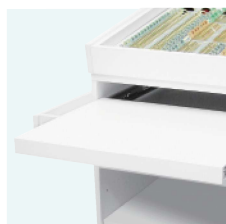

スッキリ収納

左右の引出しを使えば、検眼フレームなどをスッキリ収納できます。
また、ラックの棚位置もお好みに応じて調節が可能です。スムーズな診察、そしていつでも美しい診療空間を創出します。

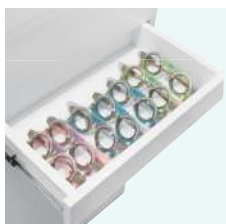

モニターアーム OPTION

ファイリングソフトを併用する場合など、専用のアームを使用し、モニターを設置することが可能です。
フレキシブルなアームが、モニターをお好みの角度に調節します。
※耐荷重:~12kg




Armorベース

キャビネットタイプではなく、デスクの上に平置きしたいというニーズにお応えて、平箱タイプを単体販売しております。
省スペースでの診察をサポートいたします。



検眼レンズのLとR

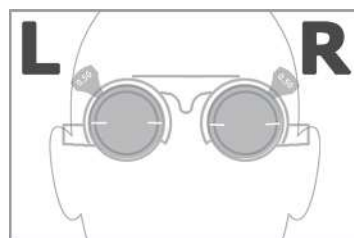

検者からみて
右側に使用するのがR
左側に使用するのがL


価格 (税別標準小売価格)

PYS-91-35A	Armor キャビネット 35対セット	¥ 560,000
PYS-91-40A	Armor キャビネット 40対セット	¥ 620,000
PYS-89-35A	Armor ベース 35対セット	¥ 460,000
PYS-89-40A	Armor ベース 40対セット	¥ 520,000
3NM-35L	Armor テストレンズ 35対セット (レンズのみ)	¥ 385,000
3NM-40L	Armor テストレンズ 40対セット (レンズのみ)	¥ 445,000


JMDN:34653000 届出番号:13B2X1036900TL2S

PYS-91	キャビネット (レンズなし)	¥ 175,000
PYS-88	ベース (レンズなし)	¥ 75,000
PYS-90-MA	オプションモニターアーム (ボール含む) OPTION	オープン価格

仕様

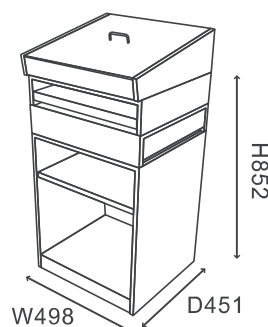

外寸法/ H1007・D451・W498mm
スライドボード/ W460・D377mm
引出し/ 2ヶ(左1・右1)
仕切り板/ 1枚 (MAX500W)
底面キャスター/ 4ヶ
付属レンズ/ メニスカス(35対 or 40対)

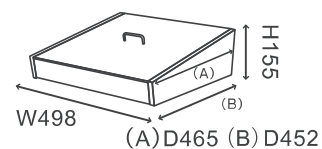

注目の累進対応検眼レンズ


近年の加速度的な高齢化社会に伴い、累進需要者は比例して増加しつつあります。

眼科施設においても、累進（遠近両用）レンズを用いた検眼の需要が高まっております。

（総務省の統計では、2025年には全人口の約48%が65歳以上となる報告が上がっております。）

※ 累進レンズとは、1枚のレンズの中での境界線がなく、度数が徐々に変化するレンズを指します。

※ 患者様の状態とレンズの組合せによって、近々、中近、遠近の処方が可能です。

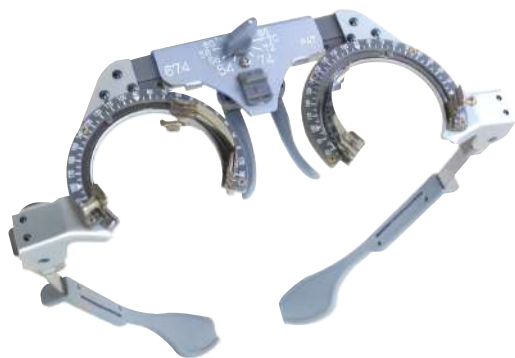

専用検眼フレーム

前面と後面に検眼レンズが装着できる仕様となっております。前面には、通常の検眼レンズ、後面には累進検眼レンズを装着します。

累進レンズセット

レンズ下部にのみ、度が入っており、上部は度なしの素通し使用となっております。
22枚入り +1.00 ~ +3.50 (11度数 / 0.25 間隔)




価格（税別標準小売価格）

674-LO	累進レンズ用試験枠PD調整付	¥ 21,400
JAN:4571209675734 JMDN:37071000 届出番号:13B3X00177000016 販売名:674シンプル-LO		

価格（税別標準小売価格）

PYS-95-11	累進レンズセット クーラ 11対	¥ 137,000
JAN:4547451328612 JMDN:34653000 届出番号:13B1X00048001971		

使用方法

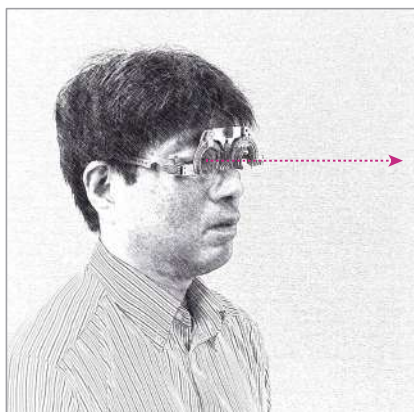

① 通常測定(例 5m)
通常検眼レンズ装着





② 近見測定(≒30cm)
通常検眼レンズ装着



③ 近見測定(≒30cm)
通常検眼レンズ+累進検眼レンズ装着

検眼フレーム前面に装着した通常検眼レンズで、度数を測定(①)した後、そのまま近見を測定(②)します。近見が見えづらい場合、後面に累進検眼レンズを重ねて装着し、近見の矯正(③)を行います。その際、前面の通常検眼レンズは外しません。

処方例

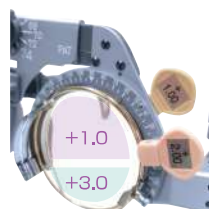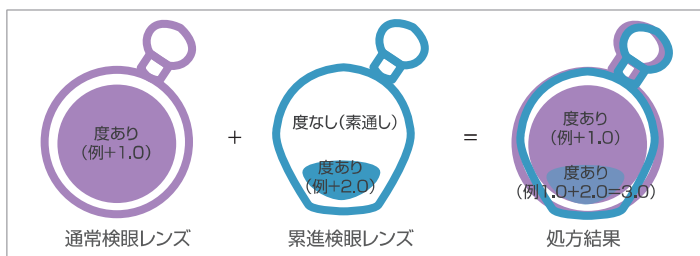

この場合の累進レンズの処方は、

① +1.0

② +3.0 (通常レンズ1.0+累進レンズ2.0)

PD調節が可能な万能試験枠。

PD調整が可能のため、あらゆる患者さまに最適な設定が可能です。
また、高い耐久性と、被験者のストレスを最大限軽減する軽量設計も特長です。

価格 (税別標準小売価格)

K-0391	万能試験枠 Black	¥ 36,000
JAN:4547451081722 JMDN:32791000 届出番号:13B1X00048000216		
K-0391-G	万能試験枠 White	¥ 36,000
JAN:4547451321019 JMDN:32791000 届出番号:13B1X00048000216		
K-0391-V	万能試験枠 Violet	¥ 36,000
JAN:4547451321033 JMDN:32791000 届出番号:13B1X00048000216		

瞳孔距離：48～80mm
角膜測定目盛り：2mm間隔
フレーム角度調整：35°(上方向30° ±5° / 下方向5° +5° -2°)
フレーム長さ調整：35mm
最大レンズ枚数：10枚(片側5枚)
レンズ角度：0°±5° / 180°±5°



レンズ一覧 (Armorキャビネット・Armorベース共通)

※Sレンズ・Cレンズは、マイナス、プラスともに2枚ずつセットされております。

スフィア(S)

	40 対	35 対		40 対	35 対
0.12	2	2	4.25	2	2
0.25	2	2	4.50	2	2
0.37	2		4.75	2	2
0.50	2	2	5.00	2	2
0.62	2		5.25	2	2
0.75	2	2	5.50	2	2
0.87	2		5.75	2	2
1.00	2	2	6.00	2	2
1.25	2	2	6.50	2	2
1.50	2	2	7.00	2	2
1.75	2	2	8.00	2	2
2.00	2	2	9.00	2	2
2.25	2	2	10.00	2	2
2.50	2	2	11.00	2	2
2.75	2	2	12.00	2	2
3.00	2	2	13.00	2	2
3.25	2	2	14.00	2	
3.50	2	2	16.00	2	2
3.75	2	2	18.00	2	
4.00	2	2	20.00	2	2

シリンダー(C)

	40 対	35 対
0.25	2	2
0.50	2	2
0.75	2	2
1.00	2	2
1.25	2	2
1.50	2	2
1.75	2	2
2.00	2	2
2.25	2	
2.50	2	2
3.00	2	2
3.50	2	2
4.00	2	2
4.50	2	
5.00	2	

プリズム

	40 対	35 対
0.5	2	2
1	2	1
2	1	1
3	1	1
4	1	1
6	1	1

アクセサリ

	40 対	35 対
グリーンレンズ	1	1
レッドレンズ	1	1
ブルーレンズ	1	1
ブラウンレンズ	1	1
ピンホール (0.5)	1	1
ピンホール (1.0)	1	1
ピンホール (1.5)	1	1
ピンホール (2.0)	1	
スリット (0.5)	1	1
スリット (1.0)	1	1
スリット (1.5)	1	
平面	2	2
マドックス 赤	1	1
フロスト	1	
クロスライン	1	
遮光板	1	1

価格 (税別標準小売価格)

3NMS-A	Armor テストレンズ S±0.12-S±10.00	¥ 3,250
3NMS-B	Armor テストレンズ S±11.0-S±14.0	¥ 3,950
3NMS-C	Armor テストレンズ S±16.0-S±20.0	¥ 3,950
3NMC-A	Armor テストレンズ C±0.25-C±3.00	¥ 4,750
3NMC-B	Armor テストレンズ C±3.50-C±5.00	¥ 5,300
3NMP-A	Armor テストレンズ プリズム 0.5°～1°	¥ 4,380
3NMP-B	Armor テストレンズ プリズム 2°～4°	¥ 4,380
3NMP-C	Armor テストレンズ プリズム 6°	¥ 4,380
3N-4	グリーンレンズ	¥ 3,000
3N-4	レッドレンズ	¥ 3,000
3N-4	ブルーレンズ	¥ 3,000
3N-4	ブラウンレンズ	¥ 3,000

3N-3	ピンホール(0.5)	¥ 2,130
3N-3	ピンホール(1.0)	¥ 2,130
3N-3	ピンホール(1.5)	¥ 2,130
3N-3	ピンホール(2.0)	¥ 2,130
3N-2	スリット(0.5)	¥ 2,130
3N-2	スリット(1.0)	¥ 2,130
3N-2	スリット(1.5)	¥ 2,130
3NMS0.00	平面	¥ 3,200
K-1281	マドックス 赤	¥ 4,000
3N-5	フロスト	¥ 3,000
3N-6	クロスライン	¥ 3,200
3N-1	遮光板	¥ 2,150

JMDN:34653000 届出番号:13B2X1036900TL2S