


電動光学台の使用上の注意

⚠ 注意 その1

器具用プラグを支柱のソケットに差し込む時に、斜めに差し込んだり、差し込みが不完全だったりすると、支柱内部に不正に電気が流れないように保護回路が働き支柱が上下動しない場合があります。
その場合は、再度プラグを正しく差し込んで下さい。

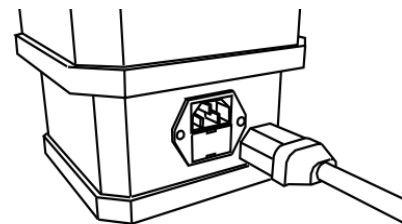

⚠ 注意 その2

およそ150秒（2分30秒）連続で上下動（連続運転）させると、支柱内部のサーモセンサーが働き、上下動が停止します。これは支柱内部の過度の温度上昇による電気基盤等の損傷を防ぐためです。
その場合は、常温で10分～15分程度放置して下さい。支柱内部の熱が一定の温度まで冷めると、再び上下動するようになります。

※ ⚠ 注意 その1、その2以外の理由で上下動がしない場合は、ご購入された販売店へご連絡して下さい。