


FLICKER MINI

フリッカー・ミニⅡ

Ⅱ

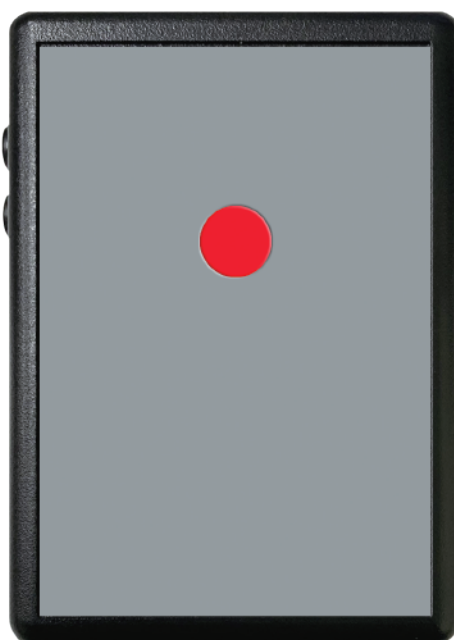

www.inami.co.jp



Find us on Facebook!

www.facebook.com/inami.co.jp

FLICKER MINI II

フリッカー・ミニII

視神経疾患を簡単スクリーニング

中心フリッカー値 (C.F.F.) 測定装置

C.F.F. Critical Fusion Frequency

K-0501

フリッカー・ミニII

標準小売価格 ¥ 70,000- (税別)

- LED パルス点灯で、ちらつきが分かり易く、より正確な検査が可能です。
- 周波数がデジタル表示になり測定値の読み取り差がありません。
- 周波数の自動送りにより周波数切り替えの個人差を軽減します。
- 検査距離は 30cm で被験者の圧迫感を軽減します。
- 上昇法・下降法に対応しております。
- コンパクトな形状で持ち運びが容易です。
- 単 4 アルカリ電池で約 50 時間動作が可能です。(連続動作時)
- 電池交換時期を表示とブザーでお知らせするサポート機能付き。



高輝度 LED デジタル表示
(本体背面)

検査方法

- ① 片眼を遮閉した被験者の眼前 30cm に手で持ちます。
- ② 点滅状態を確認させた後、UP ボタンにより周波数を上昇させ、点滅が無い事を確認します。
- ③ DOWN ボタンにより周波数を下げ、被験者が点滅を認識したらボタンを離します。
- ④ 本体背面に表示される数値が中心フリッカー値 (C.F.F.) です。

機能

- 待機機能** : 無操作状態で 1 分経過すると周波数表示を消灯して電力をセーブします。
- 電源切り忘れお知らせ機能** : 待機機能状態から 2 分経過するとブザーでお知らせします。
- 電池残量低下表示機能** : 周波数表示が点滅します。
- 電池交換表示機能** : 周波数表示部分に「Lo」と表示し、ブザーでお知らせします。
- 45Hz リセット機能** : 2 つの操作ボタンを同時に押すことで周波数を 45Hz にリセットします。

仕様

寸法 (mm): 67×92×21 / 重量 (g): 74 (電池除く) / 電源: 単 4 アルカリ電池 2 本
表示周波数: 5-60Hz (1Hz ステップ) / 周波数設定: 2 つのボタンによるアップ・ダウン式 (1Hz ステップ送り、連続送り可能)
指標サイズ: 10mm / 検査距離: 30cm



A Passion for a Nice View

※本カタログ記載価格は、すべて2023年1月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース: 〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我麻町285 A1
大阪ベース: 〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース: 〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

official web site



製造販売業許可番号 13B1X00048

v1.1