


お困りの際には

S-226 ハンド式マイクロモーターチャック

アフターサービスをご依頼いただく前に、次のことを点検して下さい。

それでも正常に作動しない時は、すぐに操作をやめ使用を中止し、販売店もしくは当社にご連絡ください。

症状	調べるところ	処置方法
作動しない	乾電池のタイプが誤っていませんか。	乾電池が1.5V単三型(マンガン)であることを確認してください。
	乾電池の残量が不足していませんか。	乾電池が消耗している場合があります。新品の乾電池に交換してください。
	電池を交換しても作動しない場合。	スイッチは入れずに、ヤスリ棒を左右に1周程度回してください。 その後、スイッチを入れると回転する場合があります。

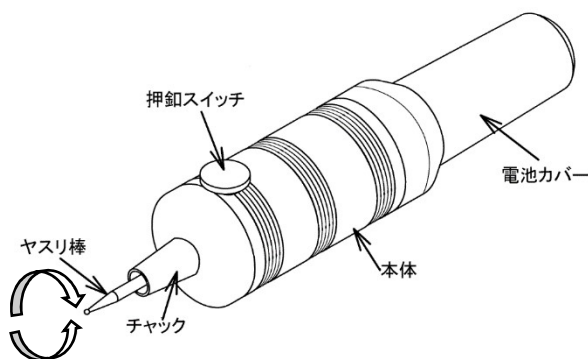

※機器は、電池を抜いた状態で保管することで、電池消耗を抑えることができます。

！ 通 知

●ご自身での分解、修理、改造は保守の対象外となりますのでおやめください。



東京都文京区本郷3丁目24番2号 〒113-0033 TEL.03-3814-1731 FAX.03-3814-3334

Website: <http://www.inami.co.jp> E-Mail: corpinfo@inami.co.jp

2021.6.初版